


**AT03001, AT03002, AT03003, AT03004, AT03005,
AT03006, AT03006 D, AT03007, AT03008, AT03009, AT03010,
AT03011, AT03012, AT03014, AT03015, AT03016, AT03017**

NÁVOD NA POUŽITIE ORTOPEDICKÉHO VANKÚŠA

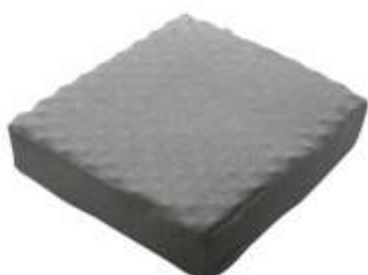

MD



VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE

Nepoužívajte výrobok pred prečítaním a pochopením týchto pokynov. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam alebo pokynom, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.

ÚČEL/INDIKÁCIE

V závislosti od typu vankúša majú rôzne použitia. Vankúš na spanie je určený predovšetkým pre ľudí, ktorí trpia napríklad tenznými a migrenóznymi bolesťami hlavy a syndrómami bolesti a napätia chrbtice.

Úlohou bedrového vankúša je udržiavať prirodzenú polohu chrbtice, podopierať ju pri dlhodobom sedení. Sedacie vankúše zabraňujú bolestiam spôsobeným dlhodobým sedením, najmä u osôb na invalidnom vozíku.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.

ROZMERY

Rozmery AT03001: dĺžka 44 cm, šírka 30 cm, výška 7 až 11 cm

AT03002 rozmery: dĺžka 44 cm, šírka 30 cm, výška 7 až 11 cm

AT03003 rozmery: dĺžka 42 cm, šírka 35 cm, výška 7 až 10 cm

AT03004 rozmery: šírka 33 cm, výška 22 cm, hrúbka 7 cm

AT03005 rozmery: šírka 33 cm, dĺžka 33 cm, výška 11 cm

AT03006/AT03006 D (v dezinfekčnom kryte):

Rozmery: - S: 42 x 38 x 8 cm, - M: 43 x 43 x 8 cm, - L: 46 x 43 x 8 cm, - XL: 48 x 43 x 8 cm

AT03007 rozmery: dĺžka: 47 cm, šírka: 32 cm, výška: 7 - 12 cm

AT03008 rozmery: 45 x 40 x 10 cm, 45 x 40 x 6 cm

AT03009 rozmery: 41 x 32 x 8 cm

AT03010 rozmery: 45 x 40 x 10 cm, 45 x 40 x 6 cm

AT03011 rozmery:

- S: 42 x 38 x 8 cm, - M: 43 x 43 x 8 cm, - L: 46 x 43 x 8 cm, - XL: 48 x 43 x 8 cm

AT03012 rozmery: 34 x 40 x 8 cm

AT03013 rozmery: 40 x 40 x 8 cm, - 37 x 37 x 8 cm

AT03014 rozmery: dĺžka: 55 cm, šírka: 31 cm výška: 7 až 11 cm

AT03015 Rozmery: dĺžka: 60 cm, šírka: 31 cm výška: 7 až 11 cm

AT03016 Rozmery: 660 x 440 x 111 mm

AT03017 rozmery: 420 x 330 x 111 mm

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokyny na umývanie krytu (modely: AT03001, AT03002, AT03003, AT03004, AT03005, AT03006, AT03007, AT03008, AT03009, AT03010, AT03011, AT03012, AT03014, AT03015, AT03016, AT03017)

- 1) Penu neumývajte!
- 2) Ručne perte iba poťah.
- 3) Čistite vlhkou špongiou a čistiacim prostriedkom.
- 4) Maximálna teplota prania 40 °C.
- 5) Nepoužívajte chlór! (Nebieľte poťah).
- 6) Nečistiť chemicky!
- 7) Nesušte v bubnovej sušičke!
- 8) Nežehliť! (Zabráňte kontaktu s vyhrievanými povrchmi, napr. radiátorom).
- 9) Zhoršenie vizuálno-estetických vlastností (napr. pokrčenie povrchu) nemá vplyv na úžitkové vlastnosti materiálu.

Pokyny na pranie poťahu (AT03006D):


1. Penu neperte!
- 2) Čistite pomocou vlhkej špongie so saponátom.
3. Maximálna teplota prania 95 °C.
- 4) Nepoužívajte chlórú aviváž! (Nebieľte kryt).
- 5) Nečistiť chemicky!
- 6) Nesušte v bubnovej sušičke!
- 7) Nežehliť! (Zabráňte kontaktu s vyhrievanými povrchmi, napr. radiátorom)
- 8) Zhoršenie vizuálno-estetických vlastností (napr. pokrčenie povrchu) nemá vplyv na úžitkové vlastnosti materiálu.

SKLADOVANIE

Výrobok by sa mal skladovať v suchej chladnej miestnosti, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

POZNÁMKY A UPOZORNENIA:

1. Je zakázané používať prípravok u detí mladších ako 3 roky. Mäkká štruktúra špongie môže vážne narušiť proces dýchania, keď dieťa leží na bruchu.
2. Nefahňte si na spací vankúš v polohe na bruchu.
3. Zabráňte kontaktu produktu s ohňom. Výrobok sa môže vznietiť.
4. Bedrový vankúš by mal byť umiestnený na operadle tak, aby jeho plochá časť bola v kontakte s operadlom, nastaveným vo výške bedrovej oblasti.
5. Vankúš na spanie (modely: AT03001, AT03002, AT03007, AT03014, AT03015) by mal byť umiestnený tak, aby horná časť vankúša bola pod krkom, ako je znázornené na obrázku nižšie:

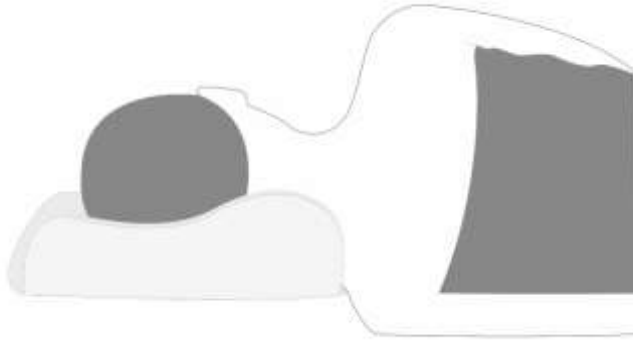**UPOZORNENIE: V PRÍPADE, ŽE SA VANKÚŠIK NACHÁDZA NA ZEMI, JE POTREBNÉ HO VYČISTIŤ:**

V prípade "vážneho incidentu" súvisiaceho s výrobkom, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol viesť alebo pravdepodobne povedie k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) úmrtie pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, používateľa alebo inej osoby, alebo
- c) vážne riziko pre verejné zdravie

uvedený "závažný incident" sa musí oznámiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Poľska je príslušným orgánom Úrad pre registráciu liekov, zdravotníckych pomôcok a biocídnych výrobkov.

UPOZORNENIE:

V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných rušivých príznakov, ktoré nie sú používateľovi jasné v súvislosti s používaním zdravotníckej pomôcky, sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak, ako v súlade s jeho určením

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalým čistením, údržbou alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Zdravotnícky pracovník na vlastnú zodpovednosť indikuje použitie pomôcky dospelým a deťom s ohľadom na dostupné varianty/veľkosti/nepotrebné funkcie/veľkosti a indikácie, pričom má na pamäti informácie poskytnuté výrobcom.

AKO ZLIKVIDOVAŤ VÝROBOK PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Po vyradení pomôcky z používania možno zdravotnícku pomôcku zlikvidovať ako bežný komunálny odpad.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....


Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 29.03.2023

v1-1 29.03.2023

