

AT03019, AT03020

NÁVOD NA OBSLUHU ORTOPEDICKÝ VANKŮŠ



MD

CE

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zdravia, zraneniu alebo nehodám. Preto, aby ste výrobok používali bezpečne a úspešne, prečítajte si pozorne tento návod.

ÚČEL

Ortopedický vankúš je vyrobený zo špeciálnej peny, ktorá sa prispôsobí tvaru tela, čo poskytuje primeranú oporu počas spánku.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. zhoršenie zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

VLASTNOSTI AT03019:

- vankúš má efekt tvarovej pamäte, vďaka čomu poskytuje dokonalú oporu krčnej chrbtici
- ricínový olej obsiahnutý vo vankúši pôsobí zdravotne, antibakteriálne a protizápalovo (obsah ricínového oleja okolo 10%)
- špeciálny povlak na vankúši má chladivý účinok a absorbuje vlhkosť
- systém dodatočných otvorov vo vnútri vankúša zaisťuje správnu ventiláciu
- vankúš je nenahraditeľný pre alergikov
- organický a ekologický produkt
- vankúš je dostupný s poťahom

ROZMERY: 66 cm x 42 cm x 11 cm

VLASTNOSTI AT03020:

- vankúš má „pamäťový“ efekt a vyrýsovaný tvar, vďaka čomu poskytuje dokonalú oporu krčnej chrbtici
- použitie ricínového oleja do vankúša, ktorý má prospešný, antibakteriálny a protizápalový účinok (obsah ricínového oleja cca 10%)
- vankúš je potiahnutý špeciálnym povlakom, ktorý pôsobí antisepticky a antidepresívne
- systém dodatočných otvorov vo vnútri vankúša zaisťuje správnu ventiláciu
- vankúš je nenahraditeľný pre alergikov
- organický a ekologický produkt
- vankúš je dostupný s poťahom

ROZMERY: 55 cm x 40 cm x 12 cm

POZNÁMKY A UPOZORNENIA:

1. Je zakázané používať výrobok u detí mladších ako 3 roky. Mäkká štruktúra špongie môže vážne narušiť dýchací proces, ak dieťa leží na brušku.
2. Neležte na vankúši v polohe na bruchu.
3. Zabráňte kontaktu produktu s ohňom. Výrobok sa môže vznietiť.

UPOZORNENIE:

Keď dôjde k „závažnému incidentu“ súvisiacemu s produktom, ktorý priamo alebo nepriamo viedol, mohol alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrťou zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby, príp
- b) prechodné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby, príp
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Poľska je príslušným orgánom Úrad pre registráciu liekov, zdravotníckych pomôcok a biocídnych výrobkov.

POZNÁMKA: V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných rušivých príznakov, ktoré sú pre používateľa nejasné, súvisiace s používaním zdravotníckeho zariadenia, sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka.

POKYNY NA ČISTENIE

Obliečku na vankúš treba prať pri teplote do 40°C. Nepoužívajte bieliadlá ani silné čistiace prostriedky. Nie v sušičke. Profesionálne chemické čistenie je zakázané. Nesmú sa používať odstraňovače škvŕn na báze rozpúšťadiel. Žehlička, mierna teplota. Žehliť pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150°C. Podľa nastavenia "vlna / hodváb / polyester / viskóza": žehlite mierne navlhčenou medzutiierkou. Môžete použiť naparovaciu žehličku. Treba sa vyhnúť silnému tlaku. Nie je dovolené prať penu vankúša!

SKLADOVANIE

Výrobok by sa mal skladovať v suchej a chladnej miestnosti, mimo priameho slnečného žiarenia.

SPÔSOB LIKVIDÁCIE PRODUKTU PO VYRADENÍ Z PREVÁDZKY

Po vyradení prístroja z používania môže byť medicínsky prístroj zlikvidovaný ako bežný komunálny odpad.

ZÁRUČNÝ LIST


Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRÍLOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

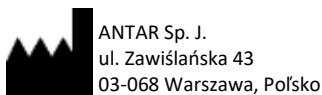

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 02.10.2022
v1-1 02.10.2022