

**AT03023**

**NÁVOD NA POUŽITIE VANKÚŠ NA OTÁČANIE PACIENTA**



**MD** **CE**

Vankúš bol vyvinutý pre opatrovateľov, ktorí sa starajú o osoby trvalo alebo dlhodobo pripútané na lôžko. Pri použití vankúša si otáčanie pacienta nebude vyžadovať veľkú silu a pre ležiaceho človeka bude táto činnosť oveľa pohodlnejšia.

**VLASTNOSTI:**


- Odolné voči deformácii
- Môže sa povrchovo dezinfikovať
- Rozmery: 49 cm x 41,5 cm x 10,6 cm

**POUŽITIE/INDIKÁCIE**

- staršie, zdravotne postihnuté alebo ochrnuté osoby
- obézni pacienti
- počas celkovej anestézie a iných kognitívnych dysfunkcií
- fyzické dysfunkcie

**POUŽÍVAJTE**

Vankúš by sa mal zasunúť pod nohy pacienta a potom otočiť požadovaným smerom (pacienta môžete udržať v určitej polohe pripevnením vankúša k lôžku pomocou dodatočného upevňovacieho popruhu).

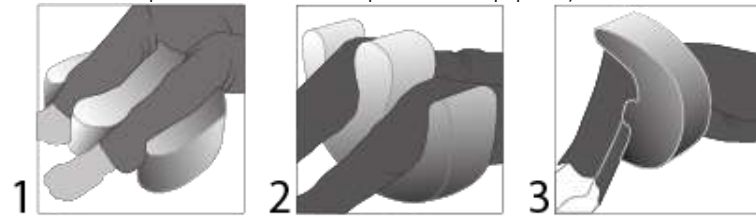

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Vankúš by sa mal čistiť vlhkou handričkou so saponátom. Výrobok sa môže prať len ručne pri teplote do 40 °C. Nesušte v sušičke, nežehlite, nebielte ani nečistite chemicky. Rozložený výrobok sušte v tieni - molitan neperte. Poťah je možné povrchovo dezinfikovať a následne utrieť čistou handričkou.

**KONTRAINDIKÁCIE**

Fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.

**SKLADOVANIE**

Výrobok skladujte v suchej chladnej miestnosti, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

**CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV**

Zdravotnícky pracovník na vlastnú zodpovednosť určí použitie výrobku pre dospelých a deti, pričom zohľadní dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/rozmery a indikácie s ohľadom na informácie poskytnuté výrobcom.

**UPOZORNENIE:** Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

**UPOZORNENIE:** Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalou údržbou, nedostatočným servisom alebo vyplývajúce z nedodržania odporúčaní uvedených v tomto návode.

**UPOZORNENIE:**

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

**UPOZORNENIE:**

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

**SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA**

Po vyradení pomôcky z používania možno zdravotnícku pomôcku zlikvidovať ako bežný komunálny odpad.

## ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.  
ul. Zawiańska 43  
03-068 Warszawa, Poľsko

### Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,  
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk  
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 15.01.2023  
v1-15.01.2023