

AT03505

NÁVOD NA POUŽITIE REHABILITAČNÝ VALEC



OPIS A ÚČEL

Rehabilitačný valec plnený pohánkovými šupkami má vďaka svojej špecifickej štruktúre a prírodnej náplni veľmi široké využitie. Poskytuje veľmi dobrú oporu pre bedrovú chrbticu a nohy. Odporúča sa najmä pre osoby, ktoré podstupujú rehabilitáciu. Dobre funguje aj ako opora na spanie, pretože sa prispôsobuje prirodzenému tvaru hlavy. Použitie prírodných materiálov a výplne z pohánkových šupiek zabezpečuje správnu cirkuláciu vzduchu.

INDIKÁCIE/APLIKÁCIA

- Bolesť chrbta,
- bolesť ramien,
- svalové napätie,
- nespavosť,
- kŕčové žily dolných končatín,
- ťažkosť a opuchy nôh.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.

POZNÁMKA

Pred prvým použitím sa odporúča vložiť valček do rúry predhriatej na 100 °C na 10 min.

POZNÁMKA: Pred použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

POZNÁMKA: Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedbalou údržbou, nedostatočným čistením alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

POZOR

Výrobok nie je povolené používať deťom mladším ako 3 roky.



VLASTNOSTI: VHODNÉ PRE DETI OD 3 ROKOV:

- bráni rastu roztočov, baktérií a iných mikroorganizmov,
- je priedušný, zabezpečuje správnu cirkuláciu vzduchu,
- nezahrieva sa od tela používateľa,
- ľahko sa prispôsobí prirodzenému tvaru tela
- správne rozkladá hmotnosť tela používateľa a zároveň poskytuje pohodlnú oporu

ZLOŽENIE

Poťah: 100 % bavlna, **výplň:** pohánkové šupky

ROZMERY: 45x15 cm

OBSAH BALENIA:

Valec, návod na použitie

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Zdravotnícky pracovník uvedie na vlastnú zodpovednosť použitie pomôcky pre dospelých a deti, pričom zohľadní dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/rozmery a indikácie a zohľadní informácie poskytnuté výrobcom.

ČISTENIE/ÚDRŽBA/SKLADOVANIE

Pred čistením vysypte obsah valca. Poťah by sa mal prať ručne pri teplote do 40 °C. Nepoužívajte silné pracie prostriedky ani bieliadlá, nečistite chemicky. Nesušte v bubnovej sušičke ani nežeľhite. Sušte položené na plochu v tieni.

Skladujte v chladnej a suchej miestnosti, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu a vlhkosti. Odporúča sa skladovanie v pôvodnom obale.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania výrobku môže byť výrobok zlikvidovaný ako bežný domový odpad.

ZÁRUČNÝ LIST


Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 AN TAR Sp. J.
ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 19.06.2023
v1-19.06.2023