

## ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Použitie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerazania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.  
03-068 Warsaw, ul. Zawiańska 43  
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30  
www.antar.net  
e-mail: antar@antar.net



Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,  
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk  
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 1. apríla 2022  
v1-1 04/01/2022

# AT51003

## CHODÍTKO

### NÁVOD NA POUŽITIE



**Vlastnosti produktu**

- Chodítko je vyrobené z kvalitného hliníka.
- Skladací rám uľahčuje prepravu.
- Chodítko je vybavené otočnými prednými a neotočnými zadnými kolesami.
- Výrobok je obohatený o sedadlo a operadlo, ktoré umožňuje odpočinok v sede.
- Chodítko má aj praktický košík na nevyhnutné drobnosti alebo drobné nákupy.

**UPOZORNENIA**

Pred začatím akýchkoľvek operácií skontrolujte stav zariadenia. Ak produkt funguje alebo vyzerá nezvyčajne, ihneď kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Antar Sp. Jawna nezodpovedá za nesprávne použitie zariadenia.

**Všeobecné bezpečnostné informácie**

1. Nesmie byť prekročená maximálna hmotnosť užívateľa 120 kg.
2. Chodítko sa nesmie používať na tradičných a eskalátorových schodoch.
3. Nesnažte sa tlačíť chodítko, keď na sedadle sedí osoba.
4. Sedačka sa nesmie používať na prepravu osôb a tovaru.
5. Sedadlo nie je možné používať bez sklopeného operadla.
6. Nesadajte si na sedadlo, keď je chodítko na naklonenom povrchu.
7. Chodítko je určené len ako pomôcka pri chôdzi.
8. Chodítko sa môže používať len s určitým príslušenstvom a náhradnými dielmi.
9. Tovar je možné prepravovať iba v košíku. Na rukoväť chodítka nevesajte ťažké predmety, pretože to môže zhoršiť stabilitu chodítka.

**Všeobecné preventívne opatrenia**

1. Pred použitím sa uistite, že chodítko bolo rozobrané.
2. Pred použitím skontrolujte funkčnosť brzd.
3. Skontrolujte, či sú všetky časti v dobrom stave a či sú pohyblivé časti funkčné.
4. Nesmiete jazdiť, keď sedíte na sedadle. Nesprávne použitie chodítka môže mať za následok vážne zranenie používateľa a/alebo poškodenie rámu alebo kolies chodítka.
5. Chodítko sa nesmie používať na chôdzu dozadu.
6. Buďte opatrní pri prekonávaní obrubníkov a iných prekážok a pri používaní chodítka na naklonených, nerovných alebo klzkých povrchoch. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k vážnemu zraneniu osôb.
7. Kým je chodítko v prevádzke, nie je dovolené vykonávať žiadne úpravy.
8. Buďte opatrní, keď sú v koši ťažké predmety (maximálna hmotnosť 5 kg).
9. Všetky kolesá musia byť vždy v kontakte so zemou.

**PRÍPRAVA NA POUŽITIE**

1. Produkt zabalený v zloženom stave, košík odpojený. Po vybratí z obalu by sa chodítko malo rozložiť zablokovaním horizontálnych dilatčných pántov.
2. Potom rozložte sedadlo, nainštalujte rukoväť a košík.
3. Nastavte výšku rukovätí.

**Pozor:**

Pri používaní a manipulácii s chodítkom a pri jeho skladaní a nastavovaní mechanizmov môže hroziť riziko zachytenia a/alebo privretia častí tela užívateľa/sprevádzajúcej osoby v otvoroch/medzerách medzi prvkami. Tieto kroky by sa mali vykonávať s mimoriadnou opatrnosťou. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matíc / skrutiek. Ak chcete bezpečne nastúpiť a vystúpiť z chodítka, musíte použiť brzdy cestných kolies.

**POUŽITIE BRZD**

Obr. 1 Parkovacia brzda zablokovaná. Obr. 2 Parkovacia brzda odblokovaná.

**SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA**

Chodítko uchovávajte mimo zdrojov svetla, vysokej teploty a vlhkosti. Nevystavujte chodítko priamemu slnečnému žiareniu. Chodítko zlikvidujte v súlade s platnými predpismi o ochrane životného prostredia a recyklácii.

**Životnosť:** 5 rokov od dátumu výroby.

**VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE**

Pred použitím sa vždy presvedčte, či sú rukoväte v správnej výške a či sú správne upevnené. Aby ste predišli riziku pádu, chodítko sa nesmie používať na nerovnom alebo naklonenom povrchu. Skontrolujte stav kolies a brzd. Nakoniec skontrolujte celkovú stabilitu rámu.

Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matíc / skrutiek.

**ÚDRŽBA A ČISTENIE**

Po každom použití odstráňte nahromadenú špinu jemnými čistiacimi prostriedkami a nechajte uschnúť. Nepoužívajte ostré, trecie špongie. Pravidelne kontrolujte činnosť brzd, stav tesnení upevňovacích prvkov a stav zvarov.

**Technické špecifikácie**

hmotnosť užívateľa 120 kg  
hrúbka sedadla 4 cm  
šírka medzi rukoväťami 50 cm  
šírka sedadla 36 cm  
výška sedadla od zeme 57 cm  
rozsah nastavenia výšky rukovätí 78–89 cm  
hmotnosť 8,80 kg



Tento znak označuje maximálnu hmotnosť užívateľa.

**URČENÉ POUŽITIE:** Výrobok je určený na podporu pohybu osôb so zníženou schopnosťou chôdze. Chodítko je určené pre jednu osobu

**KONTRAINDIKÁCIE:** fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s chodítkom

**VÝSTRAHA:**

Keď dôjde k „závažnému incidentu“ súvisiacemu s produktom, ktorý priamo alebo nepriamo viedol alebo by mohol viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrťou pacienta, užívateľa alebo inej osoby resp
- b) prechodné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby, príp
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia

vyššie uvedený „závažný incident“ sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Poľska je príslušným orgánom Úrad pre registráciu liekov, zdravotníckych pomôcok a biocídnych výrobkov.

**VÝSTRAHA:**

V prípade bolesti, alergických reakcií alebo iných rušivých, pre používateľa nejasných symptómov súvisiacich s používaním zdravotníckej pomôcky, sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom.

**UPOZORNENIE:** Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením

**POZNÁMKA:** Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty správne zmontované.

**UPOZORNENIE:** Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nedostatočným servisom alebo nedodrzaním odporúčaní uvedených v tomto návode.

**OBSAH BALENIA**

Chodítko, NÁVOD