

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.




ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 1. júna 2022
v1-1 28/06/2022

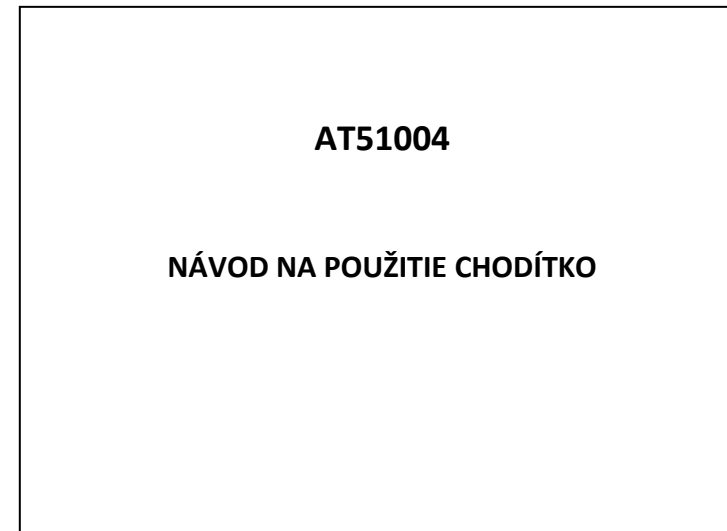

SK

INDIKÁCIE: Výrobok je určený na podporu pohybu osôb so zníženou schopnosťou chôdze. Chodítko je určené pre jednu osobu.

KONTRAINDIKÁCIE: Fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s chodítkom.

1. Obsah balenia

Chodítko s príslušenstvom (vrátane dvoch nákupných tašiek)



Obr.1

2. Rozloženie rámu

A. Rozložte rám zatlačením na bočné časti sedadla.


B. Zložte rám potiahnutím popruhu na sedadle.



Obr.2

3. Výška rukoväti sa nastavuje pomocou páčky

Ak chcete otáčať páčkou a nastavovať výšku, pred stlačením rukoväte sa uistite, že je páčka dotiahnutá.

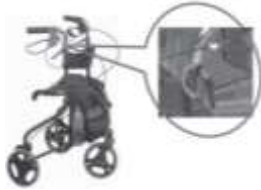

Obr.3

UPOZORNENIE: Pri používaní a obsluhu chodítka a pri jeho skladaní a nastavovaní mechanizmov môže hroziť riziko zachytenia a/alebo privretia častí tela užívateľa/sprevádzajúcej osoby v otvoroch/medzerách medzi komponentmi. Tieto kroky by sa mali vykonávať s mimoriadnou opatrnosťou. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matíc / skrutiek.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nedostatočným servisom alebo nedodržaním odporúčaní uvedených v tomto návode.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE: Pri nesprávnom používaní môže hroziť riziko prevrátenia. Dodržujte prosím pokyny pre nastupovanie/vystupovanie/premiestňovanie. Stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matíc / skrutiek.

4. Brzdzenie

A. Znížte rýchlosť alebo zastavte chodítko

Potiahnite rukoväť nahor, kým sa chodítko nezastaví alebo nespomalí.

B. Zablokovanie kolies

Postavte sa medzi rúčky a zatlačte na zaoblenú časť rukou.

Keď budete počuť hlasné kliknutie, kolesá sa zablokujú.

C. Keď chodítko stojí, brzdy musia byť zablokované.

Postavte sa medzi rukoväť a rukou stlačte spodnú časť slučky, čím ju presuniete späť do pôvodnej polohy.

D. Uvoľnenie blokovania kolesa



Obr. 4

Obr. 5

Obr.6

5. Technické parametre

Výška: 82 - 99 cm

8" kolesá

Výška sedadla: 50 cm

Vzdialenosť medzi rúčkami: 33 cm

Vzdialenosť medzi zadnými kolesami: 58 cm

Vzdialenosť medzi zadnými a prednými kolesami: 49 cm

Hmotnosť chodítka: 6,25 kg

Maximálna hmotnosť užívateľa: 130 kg

Maximálna nosnosť tašky: 5 kg

Maximálna nosnosť chodítka: 136 kg



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA.

6. ÚDRŽBA

1. Uistite sa, že sú všetky komponenty vždy zaistené.

2. Skontrolujte všetky upevňovacie skrutky, v prípade potreby ich dotiahnite.

3. Všetky poškodené alebo zničené diely ihneď vymeňte.

ÚDRŽBA KOLIES

1. Kolesá by sa mali čistiť teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Osušte suchou handričkou.

2. Ak kolesá začnú vŕzať, pravidelne ich namažte mazivom 3 v 1.

7. SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad s výnimkou elektrických výrobkov – postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení.

Čas použiteľnosti

Na základe vykonaných testov výrobca udáva 5-ročnú trvanlivosť zdravotníckej pomôcky.