



## NÁVOD NA POUŽITIE

Výrobca: AN TAR Sp. J.  
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski  
ul. Zawiślańska 43  
03-068 Warszawa  
Poľsko

Názov zdravotníckej pomôcky: **Kreslá a vozíky toaletné**  
Model: **Kreslo toaletné AT51026**

Obsah balenia: 1 ks  
Údaj o použiteľnosti: Na opakované použitie  
Nesterilná zdravotnícka pomôcka  
Dátum vydania návodu na použitie: 26.3.2018

Kreslá a vozíky toaletné sú určené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu s cieľom uľahčiť im vyprázdňovanie.

Výrobok je potrebné zmontovať vložení nádobu na nečistoty do určeného otvoru a následne umiestnením sedadla (ak sa nachádza v danom modeli). Potom možno namontovať stúpačky (ak ich produkt obsahuje). Výrobky na nohách majú reguláciu výšky nôh, s cieľom zabezpečiť užívateľovi maximálny komfort.

Po vykonaní vyprázdňovania je potrebné vyprázdniť nádobu a dôkladne ju umyť. Je možné použiť štandardné čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Po vyradení výrobku z používania je potrebné postupovať spôsobom stanoveným pre komunálny odpad.

### VAROVANIE:

Pri používaní výrobkov na kolesách je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Užívateľ by si mal sadieť len vtedy, ak sú brzdy zablokované. Nemal by sa príliš nakláňať, pretože môže dôjsť k prevráteniu. Maximálna hmotnosť užívateľa je 100 kg.

### ZÁRUKA:

Záruku poskytujeme po donie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenia spôsobeného obvyklým používaním 24 mesiacov odo dňa prevzatia pomôcky a nevzťahuje sa na poškodu. Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, oprave, nastavení alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom, než spoločnosťou ANMED PLUS, s.r.o. alebo predávajúcim.

### Výhradný distribútor:

**ANMED PLUS s.r.o.**  
Nádražná 329, 015 01 Rajec  
Tel./fax: 041 542 49 16  
[www.anmedplus.sk](http://www.anmedplus.sk)

