

## ZÁRUČNÝ LIST :

Typ:

Číslo série:

Dátum predeja:

Pečiatka predajcu

a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec, dáva od dátumu predaja záruku 2 roky na chodítko.
- 2) Počas trvania záručnej doby sa firma Anmed Plus s.r.o. zaväzuje zabezpečiť nevyhnutné opravy, aby bolo chodítko funkčné, a to v období 30 dní od dátumu obdržania reklamovaného tovaru.
- 3) Ak Anmed Plus s.r.o. zistí, že náklady na opravu sú nerentabilné, môže dôjsť k výmene výrobku.
- 4) Ak zistíte, že výrobok funguje nesprávne, pošlite ho na adresu firmy Anmed Plus s.r.o. , Nádražná 329, 015 01 Rajec, alebo sa obráťte na predajcu
- 5) **Skôr ako začnete výrobok používať, zoznámte sa s návodom na použitie. Nedodržaním pokynov výrobcu, zaniká nárok na záručnú opravu.**

## NÁVOD NA POUŽITIE

CHODÍTKO KOLESOVÉ

AT51028



 **ANMED PLUS**



## **POUŽITIE:**

Chodítka je súčasťou radu kompenzačných pomôcok, určených pre telesne postihnuté osoby a osoby so zníženou schopnosťou mobility. Chodítka je určené pre oporu a odľahčenie dolných končatín pri chôdzi, náviku chôdze, poúrazových a pooperačných stavoch a následné rehabilitáciu. Je vhodné tiež pre transport drobných predmetov.

## **POPIS:**

Skladací rám chodítka je vyrobený z povrchovo upravených hliníkových rúrok vysokej pevnosti. Rám je doplnený štyrmi kolieskami, z ktorých predné dve majú uloženie v otočnej vidlici a ergonometrickými výškovo nastaviteľnými rukoväťami. Kolieska umožňujú posúvanie chodítka a to tak, že silne uchopíte rukoväť chodítka a ľahko tlačíte dopredu. Chodítka je vybavené brzdou, ktorá sa spustí stlačením zadnej časti chodítka. Chodítka je vybavené sedadlom a nákupným košíkom.

## **TECHNICKÉ PARAMETRE:**

Nastaviteľná výška rukovätí v cm	78-88
Celková šírka	50
Hmotnosť v kg	5,75
Priemer kolieska v cm	12
Skladacie	áno

## **BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:**

Pred používaním chodítka konzultujte jeho vhodnosť s ošetrovujúcim lekárom. Pred používaním chodítka si pozorne prečítajte návod na použitie a v prípade nejasností kontaktujte vášho dodávateľa. Užívateľ chodítka musí dbať na zvýšenú opatrnosť. Užívateľ sa nesmie nedmerne nakláňať, hlavne dozadu, inak môže dôjsť k prevráteniu. Chodítka nepreťažujte a neprekračujte maximálnu nosnosť. Pri skladaní a rozkladaní postupujte opatrne, aby nedošlo k zachyteniu a úrazu prstov. Ak je chodítka v pokoji, vždy zaareťujte brzdy. Pri užívaní chodítka musia byť všetky kolesá v kontakte s podkladom.

## **ZLOŽENIE A NASTAVENIE CHODÍTKA:**

Rám chodítka vyberte z krabice a stlačením prednej a zadnej časti od seba rám rozložte. Madla vložte do otvorov v hornej časti rámu a nastavte požadovnú výšku madiel, upevnite pomocou skrutiek. Zasuňte opierku chrbta stlačením poistiek. Nasadte vidlice s kolieskami do otvorov na spodnej časti rámu a upevnite skrutky. Nakoniec nasadte nákupný košík, ktorý sa voľne zavesí na rám chodítka pod sedadlom. Po odklopení bočnej poistky, prípadne uvoľnením ďalšieho istiaceho prvku a následnom

zatlačení na blokovaciu kĺbovú vzperu, možno rám chodítka jednoduchým spôsobom zložiť do transportnej polohy.

## **ÚDRŽBA:**

Chodítka je možné čistiť a udržiavať bežnými čistiacimi, dezinfekčnými a konzervačnými prostriedkami, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá. Pre zachovanie maximálnej funkčnosti a stability odporúčame pravidelne kontrolovať polohu všetkých istiacich prvkov, stav gumových nástavcov a polohu aretačných poistiek, ev.odstraňovať mechanické nečistoty všetkých častí. V prípade nutnosti vymeňte opotrebované gumové nástavce.

## **SERVIS A OPRAVA:**

V prípade potreby odstránenia závady alebo vykonanie servisu, kontaktujte predajcu, ktorý vám poskytne všetky informácie.

## **ZÁRUKA:**

Záruka sa poskytuje na dobu 24 mesiacov od dátumu prevzatia pomôcky a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenia, spôsobené obvyklým užívaním. Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, oprave, nastavovaním alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom ako výrobcom alebo dovozcom (pozri nižšie) alebo predávajúcim.

## **Výrobca:**

ANTAR Sp. J.

ul. Zawiślańska 4303-068 Warszawa, Poľsko



## **Dovozca:**

**ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,**

**E-mail: [anmedplus@anmedplus.sk](mailto:anmedplus@anmedplus.sk); [www.anmedplus.sk](http://www.anmedplus.sk)**

**Tel./fax: 041/542 49 16**

**IČO: 44741448 DIČ: SK 2022802716**