

AT51029, AT51027

NÁVOD NA POUŽITIE CHODÍTKO



SK

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím chodítka si prečítajte návod na použitie a návod na montáž výrobku. Dodržujte bezpečnostné upozornenia.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Aby ste zachovali bezpečnosť pri používaní produktu, MUSÍTE dodržiavať nasledujúce pokyny:

UPOZORNENIE: NEZOSTAVUJTE a NEPOUŽÍVAJTE výrobok skôr, ako si prečítate tento návod a porozumiete mu. Ak nerozumiete akýmkoľvek varovaniam, upozorneniam alebo pokynom, pred pokusom o montáž produktu kontaktujte svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu produktu. Po každom nastavení výšky skontrolujte brzdové lanko, aby nedošlo k uvoľneniu lanka. Uistite sa, že sú gombíky zaistené tak, aby sa hlavná nosná konštrukcia nepohybovala vplyvom tlaku. Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže mať za následok zranenie. Pred použitím skontrolujte, či sú VŠETKY nastavenia rukoväte, kolesá a pohyblivé časti výrobku v dobrom stave. Počas používania MUSIA VŠETKY kolesá BYŤ VŽDY v kontakte so zemou, aby bola zaistená stabilita chodítka. Keď sa chodítko používa v nehybnej polohe, ručné brzdy MUSIA byť v uzamknutej polohe.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nesprávnym servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE: Počas používania a manipulácie s výrobkom, ako aj pri jeho montáži a nastavovaní mechanizmov môže hroziť riziko zachytenia a/alebo stlačenia častí tela užívateľa/asistenta v otvoroch/medzerách medzi prvkami. Tieto kroky by sa mali vykonávať obzvlášť opatrne.

POZNÁMKA: Ak sa výrobok používa nesprávne, hrozí riziko prevrátenia. Prosím, dodržujte pokyny pre nastupovanie/vystupovanie/premiestňovanie. Po nastavení stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matíc/skrutiek.

INDIKÁCIE

Chodítko je pomôcka, ktorá uľahčuje pohyb pacientom so zdravotným postihnutím alebo sťaženým pohybom. Môže byť použitý ako pomôcka pre pacientov po operačných výkonoch, ktorí nevykazujú poruchy koordinácie, pacientov s miernou dysfunkciou dolných končatín alebo ich slabosťou. Chodítko možno využiť aj ako pomôcku pri presúvaní geriatrických pacientov.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. zhoršenie zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

ROZKLADANIE

Ak chcete chodítko rozložiť, posuňte bočné rámy smerom von a potom zaistite horizontálny rozťahovací pánt. Potom umiestnite rukoväť do správnych otvorov a pripevnite brzdové lanko k rámu. Nakoniec nainštalujte kôš (popis montáže v návode nižšie).



SKLADANIE

Všetky vyššie uvedené kroky by sa mali vykonať v opačnom poradí.

MONTÁŽ KOŠÍKA

Pred pripevnením košíka k podpere vyberte podnos z koša. Kôš by mal byť umiestnený na hákoch vo výške gombíkov. Potom položte podnos na vrch koša tak, aby odrezané konce smerovali k rukovätiam.



POZNÁMKA: Pred každým použitím skontrolujte funkčnosť brzdového systému. Stlačte brzdové rukoväť a skontrolujte, či sú brzdové klátiky v dobrom kontakte s kolesami a či sú schopné chodítko zastaviť. Zatlačením rukovätí nadol aktivujete ručnú brzdu a skontrolujte, či správne funguje.

NASTAVENIE VÝŠKY RUKOVÄTE

Rukoväť by mali byť inštalované v otvoroch bočných rámov a nastavené do správnej výšky. Z vnútornej strany bočného rámu by sa mala vložiť skrutka a z vonkajšej strany by sa mala na skrutku nasadiť podložka a potom by sa mal gombík utiahnuť. Je potrebné uzamknúť rám pomocou gombíka. Gombík pevne priskrutkujte k nosnému rámu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA MONTÁŽ A DEMONTÁŽ


Po rozložení alebo zložení chodítka sa uistite, že obe rukoväť sú v rovnakej výške a nehýbu sa.

POUŽÍVANIE RUČNÝCH BRZD

1. Potiahnite brzdu smerom k rukovätiam.
2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
 - A. NA ZASTAVENIE POHYBU - držte rukoväť brzdy hore
 - B. PRE POHYB - uvoľnite rukoväť brzdy

ZABLOKOVANIE RUČNÝCH BRZD

1. Zatlačte na spodok brzdovej rukoväte, ako je znázornené, až kým nebudete počuť kliknutie (obr. 6).
2. Viac informácií nájdete v časti ODBLOKOVANIE BRZD v tomto návode

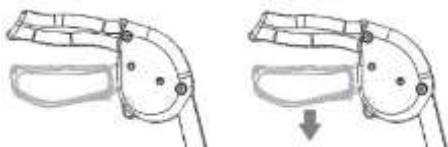

Obr. 5 (odomyknutý stav) Obr. 6 (zamknutý stav)

UVOĽNENIE RUČNÝCH BRZD

Potiahnite rukoväťe brzdy nahor, kým sa neuvoľnia, ako je znázornené na obr. 5.

2. Uvoľnite rukoväť brzdy.

3. Uistite sa, že brzdové lanko vedie pozdĺž bočnej rúrky a nepoužitá časť je zrolovaná v prednej časti chodítka.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

AT51027:

Rám: oceľ

Veľkosť kolies: 8"

Hmotnosť: 6,5 kg

Maximálna šírka: 63 cm

Maximálna dĺžka: 65 cm

Výška: od 83 cm do 97 cm

Šírka medzi rúčkami: 26 cm

Vzdialenosť medzi rúčkami: 45 cm

Dĺžka podnosu a košíka: 28 cm

Šírka podnosu a košíka: 24 cm

Výška košíka: 19 cm

Výška tašky: cca 35 cm

Maximálne zaťaženie koša: 5 kg

Maximálna hmotnosť užívateľa: 120 kg

AT51029:

Rám: hliník

Hmotnosť: 6 kg

Veľkosť kolies: 8"

Maximálna šírka: 63 cm

Maximálna dĺžka: 65 cm

Výška: od 83 cm do 97 cm

Vzdialenosť medzi rúčkami: 45 cm

Dĺžka podnosu a košíka: 28 cm

Šírka podnosu a košíka: 24 cm

Výška košíka: 19 cm

Výška tašky: cca 35 cm

Maximálne zaťaženie koša: 5 kg

Maximálna hmotnosť užívateľa: 120 kg



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA

ÚDRŽBA

1. Uistite sa, že všetky prídavné zariadenia sú vždy zaistené.
2. Skontrolujte upevňovacie skrutky rukovätí. V prípade potreby dotiahnite.
3. Okamžite vymeňte všetky poškodené komponenty.

ÚDRŽBA KOLIES

1. Očistite kolesá teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Vysušte suchou handričkou.
2. Ak kolesá začnú škripať, pravidelne ich namažte mazivom 3 v 1.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Zdravotnícky pracovník indikuje na svoju vlastnú zodpovednosť používanie chodítka pre dospelých a deti, berúc do úvahy dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/rozмеры a indikácie, berúc do úvahy informácie poskytnuté výrobcom.

OBSAH BALENIA

Chodítka, taška, košík, 2x gombík, 2x skrutka, 2x čiapočka, návod.

ČISTENIE

Výrobok čistite vlhkou handričkou, nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani ostré predmety.

SKLADOVANIE

Výrobok by sa mal skladovať v suchej a chladnej miestnosti, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania môže byť výrobok zlikvidovaný ako bežný domový odpad.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 28. júna 2022
v1-1 28/06/2022