

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRÍLOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Výrobca :

ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 15.03.2023
v1-15.03.2023



AT51037

NÁVOD NA POUŽITIE CHODÍTKO

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nesprávne používanie výrobku môže viesť k poškodeniu zdravia, zraneniu alebo nehode. Preto si v záujme bezpečného a úspešného používania výrobku pozorne prečítajte tento návod na použitie. Skontrolujte všetky časti, či nedošlo k ich poškodeniu počas prepravy. Ak takéto poškodenie spozorujete, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Ďalšie informácie vám poskytnie výrobca.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE

Výrobok NEMONTUJTE ani nepoužívajte pred prečítaním a pochopením týchto pokynov. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam alebo pokynom, pred pokusom o montáž výrobku sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka, distribútora alebo technika, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu výrobku. Chodítko nie je určené na to, aby ho používateľ riadil, keď na ňom sedí. Pri nastavovaní výšky chodítka by mal byť prítomný lekár/terapeut, ktorý zabezpečí, aby mal používateľ oporu a aby boli správne nastavené brzdy a dotiahnuté skrutky. Keď je chodítko rozložené, vždy sa uistite, že rúrka pod sedadlom je zaistená a správne pripojená k rámu a že brzdové lanko je vo vnútri bočnej rúrky a je k nej pevne pripojené. Po každom nastavení výšky skontrolujte brzdové lanko, aby ste zabránili jeho uvoľneniu. Uistite sa, že sú kľučky zaistené tak, aby sa hlavná nosná konštrukcia v dôsledku tlaku nepohla.

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalou údržbou, nedostatočným servisom alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

ÚČEL: Výrobok je určený na poskytovanie opory počas pohybu pre osoby s obmedzenou schopnosťou chôdze. Chodítko je určené pre jednu osobu.

KONTRAINDIKÁCIE: fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s chodítkom.

ROZKLADANIE

1. Vysuňte rukoväť chodítka smerom von, zatlačte na obe strany sedadla tak, aby sa háčiky pripevnili k pridržiacim tyčiam, keď počujete cvaknutie, znamená to, že sú správne pripevnené.
2. Výšku rukovätí a operadla možno nastaviť podľa potrieb používania pomocou tlačidiel a gombíkov.
3. Nákupná taška je vyrobená z nepriehľadného nepremokavého materiálu, so zipsom v hornej časti. Nákupná taška je odnímateľná na jednoduché prenášanie a čistenie.
4. Výrobok má robustné vidlice predných kolies, zadné kolesá sú vybavené účinnými a bezpečnými plastovými brzdami (vrátane hliníkových špalíkov), vybavené dvoma pedálmi, ktoré pomáhajú prekonávať nerovnosti a prekážky.
5. Zdvihnutie plastovej rukoväte uprostred sedadla môže spôsobiť zloženie výrobku!

OBSAH BALENIA: chodítko, taška, návod na použitie



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA

NASTAVENIE VÝŠKY RUKOVÄŤÍ

Stlačte západku v nastavovacej rúrke a posúvajte ju nahor alebo nadol, čím nastavíte výšku. Po nastavení sa uistite, že západka je v správnom otvore.

SKLADANIE

Zdvihnite rukoväť sedadla a zatlačte opierky rúk dovnútra, aby ste výrobok zložili.

UPOZORNENIE: Počas používania a manipulácie s výrobkom a pri skladaní a nastavovaní mechanizmov môže vzniknúť nebezpečenstvo, že časti tela používateľa/asistenta sa zachytia a/alebo stlačia v otvoroch/priechodoch medzi komponentmi. Tieto operácie vykonávajte obzvlášť opatrne. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu pevným utiahnutím matíc/skrutiek.

POUŽÍVANIE RUČNEJ BRZDY

A. PRE ZASTAVENIE - držte rukoväť brzdy hore:

B. PRE POHYB - uvoľnite rukoväť brzdy

ZABLOKOVANIE RUČNEJ BRZDY, ODBLOKOVANIE RUČNEJ BRZDY

1. Zatlačte na spodnú časť rukoväte brzdy podľa obrázka, kým nebudete počuť cvaknutie.
2. Ďalšie informácie nájdete v časti ODBLOKOVANIE RUČNEJ BRZDY v tejto príručke.

ODBLOKOVANIE RUČNEJ BRZDY

Ťahajte rukoväť brzd smerom nahor, kým sa neuvoľnia. Uvoľnite rukoväť brzdy.


Uistite sa, že brzdové lanko vedie pozdĺž bočnej rúrky a nepoužívaná časť je navinutá v prednej časti chodítka.



Obr. 1 Blokovanie



Obr. 2 Brzdenie

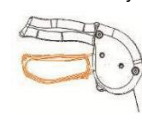

Obr. 3 Voľný pohyb

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Chodítko so štyrmi kolesami, hliníkové, skladacie.

Hmotnosť: 7 kg

Celková výška: 81-93 cm

Celková dĺžka: 74 cm

Celková šírka: 65 cm

Šírka v zloženom stave: 25,5cm

Priemer kolies: predné 10", zadné 8"

Výška sedadla: 55 cm

Hĺbka sedadla: 55 cm: 23cm

Šírka sedadla: 20 cm: 46cm .

Maximálna hmotnosť používateľa: Maximálna nosnosť: 136 kg

ČISTENIE A SKLADOVANIE: chodítko pravidelne čistite vlažnou mydlovou vodou. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, na čistenie nepoužívajte hrubé predmety. Skladujte v suchej a chladnej miestnosti mimo dosahu priameho slnečného svetla.

ÚDRŽBA

1. Dbajte na to, aby boli všetky prídavné zariadenia vždy zaistené.
2. Skontrolujte skrutku upevňujúcu sedadlo k bočným dielom. V prípade potreby ju utiahnite.
3. Okamžite vymeňte všetky poškodené alebo znehodnotené komponenty.

ÚDRŽBA KOLIES

1. Kolesá čistite teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. Osušte suchou handričkou.
2. Ak kolesá začínú vrzgať, pravidelne ich premazávajte mazivom 3 v 1.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania môže byť výrobok zlikvidovaný ako bežný domový odpad.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Zdravotnícky pracovník na vlastnú zodpovednosť určí použitie pomôcky pre dospelých a deti, pričom zohľadní dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/rozmary a indikácie a zohľadní informácie poskytnuté výrobcem.