

## ZÁRUČNÝ LIST :

Typ:

Číslo série:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu

a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec, dáva od dátumu predaja záruku 2 roky na chodítko.
- 2) Počas trvania záručnej doby sa firma Anmed Plus s.r.o. zaväzuje zabezpečiť nevyhnutné opravy, aby bolo chodítko funkčné, a to v období 30 dní od dátumu obdržania reklamovaného tovaru.
- 3) Ak Anmed Plus s.r.o. zistí, že náklady na opravu sú nerentabilné, môže dôjsť k výmene výrobku.
- 4) Ak zistíte, že výrobok funguje nesprávne, pošlite ho na adresu firmy Anmed Plus s.r.o. , Nádražná 329, 015 01 Rajec, alebo sa obráťte na predajcu
- 5) **Skôr ako začnete výrobok používať, zoznámte sa s návodom na použitie. Nedodržaním pokynov výrobcu, zaniká nárok na záručnú opravu.**

### Výrobca:

ANTAR Sp. J.

I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski

ul. Zawiślańska 43

03-068 Warszawa, Poľsko



### Dovozca:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,

E-mail: [anmedplus@anmedplus.sk](mailto:anmedplus@anmedplus.sk); [www.anmedplus.sk](http://www.anmedplus.sk)

Tel./fax: 041/542 49 16

IČO: 44741448 DIČ: SK 2022802716



## NÁVOD NA POUŽITIE

### Chodítko – rolátor štvorkolesový

Model: AT51087



## **POUŽITIE:**

Chodítko je súčasťou radu kompenzačných pomôcok, určených pre telesne postihnuté osoby a osoby so zníženou schopnosťou mobility. Chodítko je určené pre oporu a odľahčenie dolných končatín pri chôdzi, návziku chôdze, poúrazových a pooperačných stavoch a následne pri rehabilitácii. Je vhodné tiež pre transport drobných predmetov.

## **POPIS:**

Rám chodítka je vyrobený z povrchovo upravených hliníkových rúrok vysokej pevnosti a je doplnený štyrmi kolieskami. Kolieska umožňujú posúvanie chodítka a to tak, že silne uchopíte rukoväť chodítka a ľahko tlačíte dopredu. Chodítko sú vybavené ručnou brzdou, sedadlom a košíkom.

## **TECHNICKÉ PARAMETRE:**

	AT51018	AT51017	AT51014
nastavitelná výška madiel v cm	78-89	81-93	78-89
šírka v hornej časti v cm	50	50	50
hmotnosť v kg	8,8	7,45	8,8
priemer kolies	8"	6"	8"

## **BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:**

Pred používaním chodítka konzultujte jeho vhodnosť s ošetrojúcim lekárom. Užívateľ chodítka musí dbať na zvýšenú opatrnosť, mal by sa pohybovať takým spôsobom, aby chodítko neodišlo príliš ďaleko, pretože by mohlo dôjsť k pádu. Pri transporte nepoužívajte chodítko na sedenie, chodítko nepreťažujte a neprekračujte **maximálnu nosnosť 100 kg**. Pri skladaní a rozkladaní postupujte opatrne, aby nedošlo k zachyteniu a úrazu prstov. Ak je chodítko v pokoji, vždy zaareťte brzdy. **Pri používaní chodítka musia byť všetky kolesá v kontakte s podkladom.**

V situáciách, kedy je sedadlo chodítka využívané len pre krátkodobý odpočinok, keď sa pacient pohybuje samostatne (bez pomoci druhej osoby), mala by chrbtová opierka byť nastavená na opačnej strane ako sú rukoväť. V prípade, že je chodítko využívané pre presun pacienta na krátke vzdialenosti za asistencie druhej osoby, mala by chrbtová opierka byť nastavená v pozícii na strane rukovätí. Počas transportu pacienta na krátke vzdialenosti musí byť stúpačka rozložená.

**Chodítko možno použiť na transport len na krátke vzdialenosti – nenahradzuje invalidný vozík!**

## **ZLOŽENIE A NASTAVENIE CHODÍTKA:**

Rám chodítka vyberte z krabice a stlačením prednej a zadnej časti od seba rám rozložte. Madlá vložte do otvorov v hornej časti rámu a nastavte požadovnú výšku madiel, upevnite pomocou skrutiek. Brzdové lanká by mali viesť zvonka rámu a madiel. Zasuňte opierku chrbta stlačením poistiek. Nasadte vidlice s kolieskami do otvorov na spodnej časti rámu a upevnite skrutky. Nakoniec nasadte nákupný košík, ktorý sa voľne zavesí na rám chodítka pod sedadlom.

Po odklopení bočnej poistky, prípadne uvoľnením ďalšieho istiaceho prvku a následnom zatlačení na blokovaciu kľbovú vzperu, možno rám chodítka jednoduchým spôsobom zložiť do transportnej polohy.

## **BRZDY:**

Pred každým použitím vyskúšajte správnu funkciu brzd. Pri stlačení páky brzdy smerom nahor by chodítko malo pribrzdiť až úplne zastaviť. Stáčaním páky smerom dole by sa brzdy mali zaareť. Opačným spôsobom brzdy odblokujte. Vždy používajte obe brzdy súčasne.

## **ÚDRŽBA:**

Chodítko je možné čistiť a udržiavať bežnými čistiacimi, dezinfekčnými a konzervačnými prostriedkami, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá. Pre zachovanie maximálnej funkčnosti a stability odporúčame pravidelne kontrolovať polohu všetkých istiacich prvkov, odstraňovať mechanické nečistoty všetkých častí.

## **SERVIS , OPRAVA, ZÁRUKA:**

V prípade potreby odstránenia závady alebo vykonania servisu, kontaktujte predajcu, ktorý vám poskytne všetky informácie.

**Záruka sa poskytuje na dobu 24 mesiacov od dátumu prevzatia pomôcky a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenia, spôsobené obvyklým užívaním. Záruka zaniká tiež pri akejkolvek úprave, oprave, nastavovaním alebo výmene akejkolvek časti iným subjektom ako výrobcom alebo dovozcom (pozri nižšie) alebo predávajúcim.**

Záznamy požadované predpismi MDR.

## **UPOZORNENIE:**

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- vážne ohrozenie verejného zdravia

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.


## **UPOZORNENIE:**

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov spojených v súvislosti s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

## **SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA**

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad s výnimkou elektrických výrobkov – postupujte podľa spôsobu likvidácie elektrických a elektronických zariadení.

## **INFORMÁCIE**

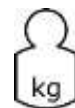

Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť užívateľa.