



NÁVOD NA POUŽITIE

Výrobca: ANTAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa
Poľsko

Názov zdravotníckej pomôcky: **Stolička do sprchy**
Model **AT51117**

Obsah balenia: 1 ks

Údaj o použiteľnosti: Na opakované použitie

Nesterilná zdravotnícka pomôcka

Osobitné podmienky zaobchádzania: Po použití alebo očistení stoličku riadne osušte.

Výstraha: - **Pred použitím sa uistíte, že stolička je umiestnená stabilne. Pri užívaní stoličky musia byť všetky nohy v kontakte s podkladom. Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame kombinovať s protišmykovou podložkou a madlom.**
- **Pri nastavovaní výšky stoličky postupujte opatrne, aby nedošlo k zachyteniu a úrazu prstov.**
- **Pri transporte (automobilom alebo autobusom) nepoužívajte stoličku na sedenie!**
- **Stoličku nepreťažujte a neprekračujte maximálnu nosnosť 100 kg!**

Dátum vydania návodu na použitie: 20. 08. 2014

Stolička do sprchy je súčasťou rady kompenzačných pomôcok, určených pre telesne postihnuté osoby a osoby so zníženou schopnosťou mobility. Svoje využitie nachádza najmä tam, kde pacient vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu nie je schopný pri osobnej hygiene využiť štandardne vybavenú sprchu. Svojou konštrukciou uľahčuje pacientom bežné úkony osobnej hygieny a zároveň eliminuje možné riziko pri týchto úkonoch, výrazným spôsobom uľahčuje manipuláciu s pacientom a zvyšuje jeho sebestačnosť.

Rám stoličky je vyrobený z povrchovo upravených duralových trubiek vysokej pevnosti. Je doplnený plastovým hygienickým sedadlom, pevnými podrúčkami a opierkou chrbta (okrem AT51009 a AT01004). Oporné nohy umožňujú výškové nastavenie stoličky a sú v spodnej časti vybavené gumovými protišmykovými nastavcami.

Nosnosť: 100 kg

NASTAVENIE VÝŠKY STOLIČKY:

Pre nastavenie výšky stoličky vytiahnite aretačnú "E" poistku a ťahom/tlakom nastavte požadovanú dĺžku nohy. Poistku potom vo zvolenej polohe vráťte späť.

Tento postup opakujte pri všetkých štyroch nohách.

ÚDRŽBA:

Stoličku možno čistiť a udržiavať umývaním vodou, použitím bežných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá a nespôsobujú mechanické narušenie povrchu.

Pre zachovanie maximálnej stability odporúčame pravidelne kontrolovať polohu všetkých istiacich prvkov, stav gumových nastavcov a polohu aretačných poistiek, popr. odstrániť mechanické nečistoty všetkých častí. V prípade nutnosti vymeňte opotrebované gumové nastavce.

ZÁRUKA:

Záruku poskytujeme po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia pomôcky a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenia spôsobeného obvyklým používaním.

Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, oprave, nastavení alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom, než spoločnosťou ANMED PLUS, s.r.o. alebo predávajúcim.

Dátum predaja:

Pečiatka predajne:

VÝHRADNÝ DOVOZCA:

ANMED PLUS, s.r.o.

Nádražná 329, 015 01 Rajec

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk

www.anmedplus.sk

Tel. / Fax: 0 415 424 916

