

**AT51126**

**NÁVOD NA POUŽITIE STOLIČKA DO SPRCHY**



**MD**

**CE**

**SK**

### **Úvod**

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zdravia, zraneniu alebo nehode. Preto si pre bezpečné a úspešné používanie pozorne prečítajte tento návod.

### **VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA**

Výrobok NEMONTujte ani nepoužívajte pred prečítaním a pochopením tohto návodu. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam alebo pokynom, pred pokusom o montáž výrobku sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka, distribútora alebo technika, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu výrobku. Skontrolujte všetky diely, či neboli poškodené pri preprave. Ak sa takéto poškodenie zistí, výrobok NEPOUŽÍVAJTE. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

### **UPOZORNENIE:**

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

### **UPOZORNENIE:**

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

### **POZNÁMKA**

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalou údržbou, nedostatočným servisom alebo v dôsledku nedodržania odporúčaní uvedených v tomto návode na použitie.

### **UPOZORNENIE**

Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

### **UPOZORNENIE**

Pri nesprávnom používaní výrobku môže vzniknúť riziko prevrátenia. Dodržiavajte odporúčania pre nasadenie a vysadenie.

### **UPOZORNENIE**

Počas používania a manipulácie s výrobkom a pri skladaní a nastavovaní mechanizmov môže vzniknúť nebezpečenstvo zachytenia a/alebo stlačenia častí tela používateľa/asistenta v otvoroch/medzerách medzi komponentmi. Tieto operácie vykonávajte obzvlášť opatrne. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu opatrným dotiahnutím matíc/skrutiek.

### **INDIKÁCIE**

Toaletná stolička je určená pre zdravotne postihnuté osoby s poruchami pohybového aparátu a starších ľudí.

### **KONTRAINDIKÁCIE**

Fyzické alebo psychické obmedzenia, ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

### **VLASTNOSTI PRODUKTU:**

- pohodlné sedadlo
- odnímateľné opierky na ruky pre jednoduchšie používanie
- ľahká, ale robustná konštrukcia

## MONTÁŽ

Do pripravených otvorov naskrutkujte rúrky operadla. Potom upevnite rám A a rám B pomocou dodaných šróbov. Nakoniec nasadíte podrúčky, nastavte vhodnú výšku sedadla (6 stupňov nastavenia v krokoch po 2,5 cm) a skontrolujte, či je stolička stabilná.

## DEMONTÁŽ

Všetky operácie vykonajte v opačnom poradí, ako je popísané v časti „MONTÁŽ“:

## USKLADNENIE:

Výrobok skladujte na suchom mieste, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.

## ÚDRŽBA


- 1 Dbajte na to, aby boli všetky súčasti vždy zaistené.
2. Skontrolujte všetky upevňovacie skrutky, podľa potreby ich utiahnite.
3. Bezodkladne vymeňte všetky poškodené alebo znehodnotené komponenty.

## ČISTENIE

Výrobok čistite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.  
Na čistenie nepoužívajte drsné nástroje ani silné čistiace prostriedky.

## POPIS KOMPONENTOV

1. rúrky podrúčky x2
2. plastové operadlo x1
3. šróby na upevnenie operadla x4
4. rúrky operadla x2
5. sedadlo x1
6. podložky x 9
7. rámová rúrka (A) x1
8. šróby na upevnenie rámu A a B x5
9. rámová rúrka (B) x1

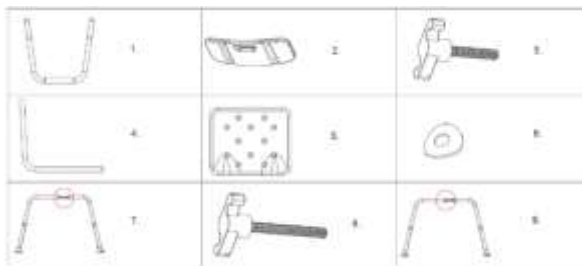

## Technické špecifikácie

Celková výška: 73 cm - 85 cm

Celková šírka: 51 cm

Celková dĺžka: 49 cm

Šírka sedadla: 40 cm

Hĺbka sedadla: 33 cm

Výška opierky na ruky: 19 cm

Výška od podlahy po sedadlo: 41 cm až 54 cm

Hmotnosť: 5,75 kg

**Maximálna hmotnosť používateľa: 100 kg**

Rám: hliník

Sedadlo a operadlo: PE



**TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA**

OBSAH BALENIA: stolička (pozri popis komponentov), návod na použitie

## CIELOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Zdravotnícky pracovník indikuje použitie výrobku pre dospelých a deti na vlastnú zodpovednosť, pričom zohľadňuje dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/rozmery a indikácie a zohľadní informácie poskytnuté výrobcom.

## SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po vyradení pomôcky z používania sa zdravotnícka pomôcka môže zlikvidovať ako bežný domový odpad.

## ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.  
ul. Zawiślańska 43  
03-068 Warszawa, Poľsko

### Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,  
E-mail: [anmedplus@anmedplus.sk](mailto:anmedplus@anmedplus.sk); [www.anmedplus.sk](http://www.anmedplus.sk)  
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 19.07.2022

v1-1 19.7.2022