

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Výrobca:

ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

Dátum vydania návodu: 20.11.2022

v1-1 20.11.2022

AT51128

NÁVOD NA POUŽITIE

SCHODÍK DO VANE



MD

CE

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu alebo nehodám. Pre bezpečné a úspešné používanie si preto pozorne prečítajte tento návod.

UPOZORNENIE: Skontrolujte všetky diely, či neboli poškodené pri preprave. Ak spozorujete takéto poškodenie, výrobok NEPOUŽÍVAJTE. Viac informácií uvýrobcu.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE: V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním pravidiel čistenia, nesprávnym servisom alebo nedodržaním odporúčaní uvedených v tomto návode.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

ÚČEL

Schodík do vane je špeciálne zariadenie, ktoré umožňuje zdravotne postihnutým osobám bezpečný a pohodlný vstup do vane, používanie toalety a prístup na miesta vo výške.

Vlastnosti produktu:

- Široká platforma na chodidlá zaručuje pohodlné používanie
- Protišmykové násadky na nožičkách zaisťujú bezpečnosť a stabilitu
- Perforovaný povrch pre odvádzanie vody
- Nastaviteľná výška (3 úrovne nastavenia)

Indikácie

Obmedzený rozsah pohybu, podpora pri zbieraní predmetov z podlahy alebo ťažko dostupných miest.

Kontraindikácie

Fyzické alebo duševné obmedzenia, ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

Čistenie / likvidácia

1. Výrobok čistite vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom (napr. sivým mydlom). Skladujte na suchom mieste.
2. Komunálny odpad by sa mal likvidovať v súlade s platnými podmienkami likvidácie.

Obsah balenia: plastová plošina (1 ks), prvok s nohami v tvare U (2 ks), rovné rúrky (2 ks), sada motýlkových skrutiek (4 krátke skrutky, 2 dlhé skrutky).

Pokyny na inštaláciu:

1. Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky potrebné prvky.
2. Položte plošinu hore nohami na rovný povrch.
3. Umiestnite rovné rúrky rovnobežne s dlhým okrajom na plošinu.
4. Potom spojte rovné rúrky s nohami. Na tento účel použite 2 krátke skrutky (2 skrutky na každej strane).
5. Pomocou ďalších dvoch dlhých skrutiek pripevnite nohy k plošine. Otvor na skrutku je v strede nôh.

Technické parametre:

Plocha platformy: 40 x 22 cm

Výška platformy: 21-26 cm

Celková šírka: 41,5-43,5 cm

Maximálna hmotnosť užívateľa: 110 kg

Hmotnosť: 1,5 kg



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA

Obsah balenia: schodík do vane, návod na použitie

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV:

Zdravotnícky pracovník na vlastnú zodpovednosť indikuje použitie výrobku pre dospelých a deti s prihliadnutím na dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/rozmery a indikácie, pričom zohľadní informácie poskytnuté výrobcom.