

AT51192

NÁVOD NA POUŽITIE CHODÍTKO



SK

Účel chodítka

Ľahké 4-kolesové chodítko AT51112 je navrhnuté tak, aby poskytovalo podporu a oporu ľuďom, ktorí nemôžu alebo sa necítia dostatočne sebedomí na to, aby chodili bez podpory. Chodítko je určené na vnútorné aj vonkajšie použitie. Zariadenie je možné zložiť pre skladovanie a prepravu. Produkt je navyše vybavený sedadlom a taškou.

KONTRAINDIKÁCIE

fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. zhoršenie zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

Všeobecné bezpečnostné informácie

1. Neprekračujte maximálnu hmotnosť užívateľa 136 kg.
2. Chodítko sa nesmie používať na tradičných a eskalátoroch.
3. Nepokúšajte sa tlačiť chodítko, kým osoba sedí na sedadle.
4. Sedačka sa nesmie používať na prepravu osôb alebo tovaru.
5. Nepoužívajte sedadlo bez sklopeného operadla.
6. Nesadajte si na sedadlo, keď je chodítko na naklonenom povrchu.
7. Chodítko slúži len na podporu chôdze.
8. Chodítko sa môže používať len so špecifikovaným príslušenstvom a náhradnými dielmi.
9. Veci je možné prepravovať iba vo vrecku. Na rukoväť chodítka nevešajte ťažké predmety, pretože to môže zhoršiť stabilitu chodítka.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

POZNÁMKA: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nesprávnym servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

POZNÁMKA: Ak sa výrobok používa nesprávne, hrozí riziko prevrátenia. Prosím, dodržujte pokyny pre nastupovanie/vystupovanie/premiestňovanie. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matic/skrutiek.

Všeobecné preventívne opatrenia

1. Pred použitím sa uistite, že je chodítko správne rozložené.
2. Pred použitím skontrolujte brzdy.
3. Skontrolujte, či sú všetky časti v dobrom stave a či sú pohyblivé časti funkčné.
4. Nesprávne používanie chodítka môže používateľovi spôsobiť vážne zranenie a/alebo poškodiť rám alebo kolesá chodítka.
5. Chodítko nepoužívajte na chôdzu dozadu.
6. Buďte opatrní pri prechádzaní cez obrubníky a iné prekážky a pri používaní chodítka na naklonených, nerovných alebo klzkých povrchoch. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu používateľa.
7. Počas používania chodítka nevykonávajte žiadne úpravy.
8. Buďte opatrní, ak sú v koši ťažké predmety (max. hmotnosť 5 kg).
9. Všetky kolesá musia byť vždy v kontakte so zemou.
10. Pred použitím sedačky zabrzďte.
11. Keď používate chodítko v nehybnej polohe, zabrzďte.

Upozornenie na rozbalenie produktu

1. Pred montážou chodítka si prosím dôkladne skontrolujte všetky diely.
2. Chodítko nezostavujte, ak sú niektoré časti poškodené.
3. Chodítko nemontujte, ak niektorý z dielov uvedených v obsahu balenia chýba.
4. Pri vybalovaní dielov sa uistite, že brzdové rukoväte a lanká nie sú zamotané, pretože to môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť zmontovaných brzd.

OBSAH BALENIA

Chodítko: hlavný rám, operadlo, zadné kolesá s madlami, sada predných kolies, držiak palice, návod na použitie

Montáž a nastavenie výšky

1. Skontrolujte, či sú všetky kolíky v dobrom stave a voľne sa otáčajú.
2. Skontrolujte, či je taška správne pripevnená a či sú všetky upevňovacie západky zatvorené.
3. Na zostavenie chodítka musia byť predné a zadné kolíky zaistené pomocou svoriek na zadných nožičkách a svoriek "C" na predných nožičkách. Všetky položky by mali byť umiestnené v rovnakej výške. (obr. 1 a 2)
4. Umiestnite rukoväť do rámu a potom utiahnite gombík. (obr.3)
5. Výška sedadla sa nastavuje posunutím čapových mechanizmov zapustených v ráme a ich zaistením v pevnej polohe príslušnými západkami. Uistite sa, že je počuť kliknutie, keď sú svorky zaistené, že všetky nožičky sú v kontakte so zemou a že chodítko je stabilné.
6. Ak chcete nastaviť výšku rukovätí, postupujte takto:
 - a) Postavte sa vzpriamene za chodítko, uvoľnite ramená a spustite ruky pozdĺž tela, pozerajte sa priamo pred seba.
 - b) Rukoväť chodítka by mali byť teraz nastavené tak, aby boli vo výške zápästí.
 - c) Týmto spôsobom budú ruky používateľa pri používaní chodítka ohnuté v uhle približne 20-30 stupňov.
 - d) Skontrolujte, či sú otvory rukovätí a rámu zarovnané.
 - e) Vložte rukoväť do vhodne orientovaných otvorov v ráme a potom ich pevne utiahnite pomocou gombíkov.
7. Operadlo by malo byť umiestnené v príslušných otvoroch (obr. 4)
8. Pred použitím chodítka dôkladne skontrolujte brzdy. POZNÁMKA: Brzdy boli nastavené výrobcom a ak sú správne zmontované, nevyžadujú pred použitím opätovné nastavenie. Ako skontrolovať brzdy: Zatiahnite a uvoľnite parkovaciu brzdú desaťkrát na každej strane. (Brzda sa zablokuje zatlačením páky nadol a uvoľní sa potiahnutím nahor.) Zatiahnutá brzda by mala znehybniť koleso a zabrániť mu v pohybe. Po uvoľnení by mala byť medzera medzi brzdovým obložением a čapom 3-4 mm.
9. Skontrolujte, či sú všetky ostatné matice, skrutky a gombíky dotiahnuté.



Skladanie

Všetky vyššie uvedené kroky sa musia vykonať v opačnom poradí.


Sadanie

Pri používaní chodúľky AT51112 dôsledne dodržiavajte preventívne opatrenia na prvej strane, najmä:

1. Uistite sa, že je zatahnutá parkovacia brzda.
2. Nepoužívajte sedadlo bez operadla sklopeného do správnej polohy.
3. Sedačku nepoužívajte, ak je chodítko na naklonenom alebo nerovnom povrchu.
4. Neprekračujte maximálnu hmotnosť používateľa.
5. Nepoužívajte chodítko ako invalidný vozík.

Kontrola a používanie brzd

1. Pred použitím chodítka sa vždy presvedčte, či sú brzdy plne funkčné.
2. Skontrolujte činnosť brzd vyťahnutím brzdových páčok, ako je znázornené na obr. 3 - chodítko by sa nemalo pohybovať.
3. Ak chcete použiť parkovaciu brzdú, zatlačte brzdové páčky nadol. Počuteľné cvaknutie znamená, že brzda je v správnej polohe - chodítko by sa nemalo pohybovať (pozri obr. 4). Upozorňujeme, že pri použití parkovacej brzdy musia byť obe páčky stlačené. Na uvoľnenie parkovacej brzdy je potrebné zdvihnúť páky.
4. Ak sa po zatahnutí parkovacej brzdy alebo zatahnutí brzdovej páky počas chôdze zadné kolesá chodítka naďalej pohybujú, chodítko okamžite prestaňte používať. Nesmie sa používať, kým nie sú brzdy skontrolované a nastavené. Pozrite si časť údržby

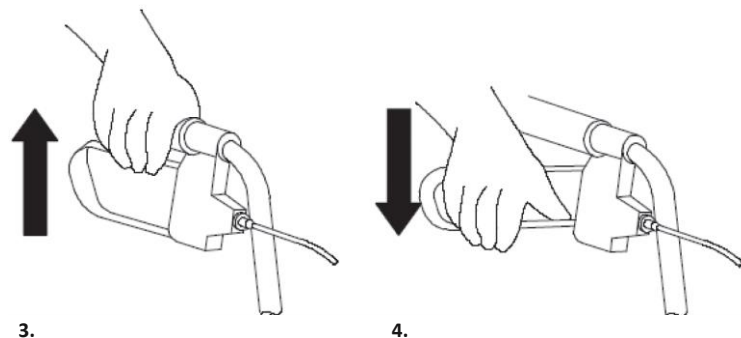

Čistenie

I) Chodítko by sa malo pravidelne čistiť tak, že ho utriete mäkkou vlhkou handričkou a potom ho utriete dosucha.


2. Nedovoľte, aby sa okolo osí brzd alebo na čapoch nahromadilo veľké množstvo nečistôt. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani abrazívne predmety.

Údržba

1. Pravidelne kontrolujte opotrebovanie častí chodítka a uistite sa, že všetky skrutkové spoje sú správne urobené.
2. Uistite sa, že brzdy fungujú správne tak, že ich použijete počas chôdze, kým sa chodítko nezastaví.
3. Presvedčte sa, že parkovacia brzda funguje správne, posunutím pák do polohy, v ktorej sa zablokuje, a pokúste sa pohnúť chodítkom.
4. Ak deaktivácia brzd nevedie k úplnému zastaveniu čapu, je potrebné nastaviť brzdy.

Nastavenie brzd (pozri obr. 4)

1. Na oboch stranách chodítka sú dva nastavovače brzd – jeden pred brzdovou pákou a druhý na zadných nohách rámu, za kolíkmi.
2. Pre nastavenie brzdovej páky uvoľnite poistnú maticu (na tento účel môže byť potrebné použiť vhodné náradie), otočte nastavovací prvok proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zvýšili brzdny tlak, a potom poistnú maticu opäť utiahnite (pozri obr. 4).
3. Ak chcete nastaviť brzdu na zadných nohách rámu, uvoľnite poistnú maticu (môže byť potrebné použiť vhodné nástroje), otočte nastavovač proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zvýšili brzdny tlak, a potom poistnú maticu znova utiahnite. Správne nastavenie brzdového mechanizmu vyžaduje dodržanie medzery maximálne 3-4 mm medzi jeho obložením a čapom - tieto prvky by sa tiež nemali navzájom dotýkať.
4. Poznámka: Po zmene nastavení brzd ich pred použitím chodítka otestujte.
5. Ak nastavenie nezvýši brzdny tlak, chodítko nepoužívajte.

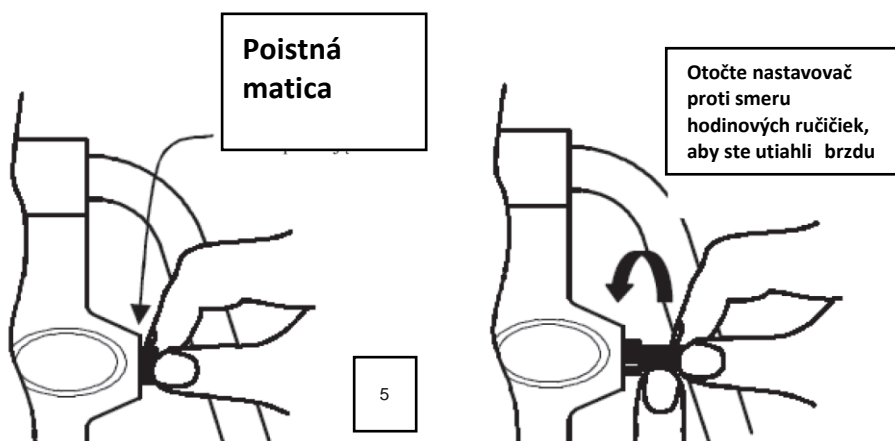

ŠPECIFIKÁCIA

Celková šírka: 63 cm
Vzdialenosť medzi rúčkami: 45 cm
Výška sedu: 53 - 69 cm
Rozsah nastavenia výšky rukoväte: 85 - 95 cm
Výška chodítka: 66 cm
Šírka sedadla: 32 cm
Čistá hmotnosť produktu: 6,6 kg
Priemer kolesa: 19 cm
Maximálne zaťaženie vrecka: 5 kg
Maximálna hmotnosť užívateľa: 136 kg



TENTO SYMBOL OZNAČUJE MAXIMÁLNU HMOTNOSŤ UŽÍVATEĽA

Poznámka: Počas používania a prevádzky invalidného vozíka, ako aj pri jeho skladaní a nastavovaní mechanizmov môže hroziť riziko zachytenia a/alebo privretia častí tela používateľa/asistenta v otvoroch/medzerách medzi prvkami. Tieto kroky by sa mali vykonávať obzvlášť opatrne. Po nastavení stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matíc/skrutiek.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Zdravotnícky pracovník indikuje na svoju vlastnú zodpovednosť používanie produktu pre dospelých a deti, berúc do úvahy dostupné varianty/veľkosti/potrebné funkcie/rozmery a indikácie, berúc do úvahy informácie poskytnuté výrobcom.

SKLADOVANIE

Výrobok by sa mal skladovať v suchej a chladnej miestnosti, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad s výnimkou elektrických výrobkov – vtedy postupovať spôsobom zodpovedajúcim likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 19.06.2023

v1-19.06.2023