

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....
Sériové číslo:

.....
Dátum predaja:

.....
Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:
.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prepichnutia alebo prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vnútorných mechanických síl, tlaku váhy prekračujúcej maximálnu váhu užívateľa popísanej v návode na použitie, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
7. TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 8) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Výrobca:

ANTAR Sp. J
I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski
Ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko
Tel. 22 518 36 00
Fax 22 518 36 30
www.antar.net

Výhradný distribútor:

ANMED PLUS s.r.o.
Nádražná 329
015 01 Rajec
Tel .: 0 415 424 916; Fax: 0 415 424 916
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk;
WWW: www.anmedplus.sk



NÁVOD NA POUŽITIE

Nadstavec na WC AT51204



V.SK-27.8.2018

Nadstavce na WC s poklopom a podrúčkami AT51204 sú určené pre ľudí s artritídou, ľudí po operácii bedrového kĺbu a iných, ktorí majú problémy s pohybom, vstávaním a sadaním. Nadstavec má moderný upevňovací systém, umožňujúci jednoduchú stabilizáciu na toalete. Ergonomický tvarovaný povrch nadstavca spôsobuje rovnomerné rozloženie tlaku na povrch tela používateľa. Mierny sklon sedadla pod uhlom vynúti správnu polohu tela a znižuje ohyb v bedrových a kolenných kĺboch. Toaletný nadstavec má dva výrezy vpredu a vzadu, čo uľahčuje hygienické činnosti v sede.

Vlastnosti výrobu:

- bezpečné upevnenie na toaletu na upínacie svorky (stabilnejšie ako na klipsách)
- montáž nevyžaduje náradie
- vybavený sklopnými držadlami, ktoré pomáhajú osobe so zdravotným postihnutím vstávať z toalety
- nadstavec je vhodný pre väčšinu toaliet, má tiež 3 úrovne nastavenia výšky

Technické údaje:

Celková výška (cm): 37-59 (s vyvýšenou doskou) cm

Rozmery, šírka x dĺžka (cm): 40 (nadstavec) / 57 (s podrúčkami) x 46

Nastaviteľná výška sedadla (cm): 6, 10, 14

Šírka medzi hornou časťou podrúčiek (cm): 47

Hmotnosť produktu: 4,2 kg

Hmotnosť užívateľa a maximálne zaťaženie nesmie presiahnuť 180 kg

Čistenie:

- Jednoduché čistenie, bez vonkajších drsných povrchov.
- Nepoužívajte brúsne prostriedky alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak sa objavia akékoľvek chyby alebo poškodenia, ihneď informujte dodávateľa. Nepoužívajte výrobok, ak existuje podozrenie, že je poškodený, alebo niektoré časti chýbajú.
- Čistite horúcou vodou s mydlom alebo jemnými čistiacimi prostriedkami.

Inštalácia:

- odstráňte dve predné plastové krytky
- uvoľnite skrutku a umiestnite tyč do požadovanej výšky
- utiahnite ju pomocou dvoch skrutiek
- upevnite zadnú tyč podobným spôsobom, obe by mali byť v rovnakej výške
- odstráňte doterajšie toaletné sedadlo a vložte dve závitové tyče na miesto jeho upevnenia na záchodovej mise
- dotiahnite nadstavec na toaletu pomocou plastových skrutiek
- pred prvým použitím skontrolujte, či je sedadlo správne a bezpečne namontované

Bezpečnostné opatrenia:

- nestavajte na nadstavec
- pred použitím skontrolujte upevnenie
- nepoužívajte poškodený alebo zlomený nadstavec
- držte výrobok mimo dosahu detí

Balenie: 1 kus