

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....
Sériové číslo:

.....
Dátum predaja:

.....
Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:
.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prepichnutia alebo prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vnútorných mechanických síl, tlaku váhy prekračujúcej maximálnu váhu užívateľa popísanej v návode na použitie, znečistenia výrobku masnými substanciami alebo benzínom.
7. TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 8) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Výrobca:

ANTAR Sp. J
I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski
Ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko
Tel. 22 518 36 00
Fax 22 518 36 30
www.antar.net

Výhradný distribútor:

ANMED PLUS s.r.o.
Nádražná 329
015 01 Rajec
Tel.: 0 415 424 916; Fax: 0 415 424 916
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk;
WWW: www.anmedplus.sk



NÁVOD NA POUŽITIE

Nadstavec na WC AT51205



V.SK-27.8.2018

Nadstavce na WC s poklopom a podrúčkami AT51205 sú určené pre ľudí s artritídou, ľudí po operácii bedrového kĺbu a iných, ktorí majú problémy s pohybom, vstávaním a sadaním. Nadstavec má moderný upevňovací systém, umožňujúci jednoduchú stabilizáciu na toalete. Ergonomický tvarovaný povrch nadstavca spôsobuje rovnomerné rozloženie tlaku na povrch tela používateľa. Mierny sklon sedadla pod uhlom vynúti správnu polohu tela a znižuje ohyb v bedrových a kolenných kĺboch. Toaletný nadstavec má dva výrezy vpredu a vzadu, čo uľahčuje hygienické činnosti v sede.

Vlastnosti výrobku:

- bezpečné pripevnenie na toaletu
- vybavený sklopnými podrúčkami, ktoré pomáhajú osobe so zdravotným postihnutím vstávať z toalety
- nadstavec sa hodí pre väčšinu toaliet

Technické údaje:

Celková výška (cm): 35-60 (s vyvýšenou doskou) cm

Rozmery, šírka x dĺžka (cm): 40 (nadstavec) / 54 (s podrúčkami) x 46

Šírka medzi hornou časťou podrúčiek (cm): 47

Hmotnosť výrobku: 3,6 kg

Hmotnosť užívateľa a maximálne zaťaženie nesmie presiahnuť 180 kg

Inštalácia:

- Podrúčky majú byť pripevnené k nadstavcu pomocou skrutiek, ktoré sú v súprave s podrúčkami (je potrebné mať veľkosť 4).
- Zložte predný prvok nadstavca k prednej časti toalety a potom utiahnite upevňovací prvok pomocou skrutky umiestnenej v prednej časti nadstavca. Ergonomický a robustný dizajn skrutky umožňuje presnú a trvalú stabilizáciu nadstavca. Upevnenie je zaistené proti posunutiu.
- Zdvihnutý aj spustený poklop je zabezpečený proti náhodnej demontáži.
- Pred prvým použitím skontrolujte, či je nadstavec správne a bezpečne namontovaný.

UPOZORNENIA:

1. Počas používania a skladania, tiež pri nastavovaní mechanizmov môže dôjsť k nebezpečenstvu zachytenia a/alebo stlačenia častí tela používateľa/sprievodnej osoby v otvoroch/medzerách medzi prvkami.
2. Po ukončení nastavení stabilizujte polohu dôkladným utiahnutím matiek/skrutiek.
3. Pred každým použitím výrobku vždy skontrolujte, či sú všetky nastaviteľné časti bezpečne pripevnené.
4. Dávajte pozor na mokrých alebo klzkých povrchoch.
5. Nedávajte prsty do otvorov na sedadle slúžiacich na odvádzanie vody. Mohlo by to spôsobiť porezanie alebo uviaznutie prsta.
6. Nepoužívajte poškodený alebo zlomený nadstavec.
7. Udržujte výrobok mimo dosahu detí. Maximálne zaťaženie sa nevzťahuje na poklop.
8. Poklop nie je určený na sedenie.
9. Nadstavec nie je určený na nepretržité sedenie.
10. Pri spúšťaní podrúčok sa môžu zachytiť časti odevu alebo tela.
10. Chýbajúce, poškodené alebo opotrebované časti môžu byť vymenené len autorizovaným servisom.
11. Na čistenie nepoužívajte vysokotlakové alebo agresívne čistiace prostriedky.

Údržba produktu:

- Jednoduché čistenie, bez vonkajších drsných povrchov.
- Nepoužívajte brúsne prostriedky alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak sa objavia akékoľvek chyby alebo poškodenia, ihneď informujte dodávateľa. Nepoužívajte výrobok, ak existuje podozrenie, že je poškodený, alebo niektoré časti chýbajú.
- Nepoužívaný produkt musí byť skladovaný v suchom prostredí. Zabráňte dlhodobému vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu.

Balenie: 1 kus