

NÁVOD NA POUŽITIE
REHABILITAČNÁ PODUŠKA NA SEDENIE
AT51413, AT51414

Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Pred použitím je potrebné dôkladne sa oboznámiť s návodom na použitie. Nesprávne použitie môže viesť k ujme na zdraví, ublíženiu alebo nehodám. Pre bezpečné a úspešné používanie si preto prečítajte pozorne tento návod.

Upozornenie:

Skontrolujte produkt, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy. V prípade akéhokoľvek poškodenia, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Viac informácií u výrobcu.

Upozornenie:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Upozornenie:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov spojených v súvislosti s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalosťou, nedostatočnou údržbou alebo v dôsledku nedodržania pokynov obsiahnutých v tomto návode na použitie.

Upozornenie:

Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením.

Upozornenie:

Horľavý.

Výrobok nesmú používať deti mladšie ako 3 roky.

Použitie:

Výrobok je určený pre ľudí, ktorí potrebujú rehabilitáciu v dôsledku sedavého spôsobu života.

Kontraindikácie:

Fyzické alebo duševné obmedzenia (napr. porucha zraku), ktoré znemožňujú bezpečné zaobchádzanie s výrobkom.

Vlastnosti:

- odľahčenie driekovej chrbtice v sede
- možno použiť ako pri cvičení, tak aj pri rehabilitácii
- podporuje správne držanie tela pri sedení

Aplikácia:

- balančné cvičenia
- rehabilitácia po úraze
- rozvíjanie návyku správneho držania tela
- posilňovacie cvičenia
- nápravná gymnastika
- odľahčenie chrbtice pri sedení
- masáž chodidiel a zlepšenie krvného obehu

Skladovanie

Výrobok skladujte na suchom mieste, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Údržba

Podušku je potrebné čistiť vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ostré predmety ani rozpúšťadlá.

Likvidácia

Komunálny odpad by sa mal likvidovať v súlade s platnými podmienkami likvidácie.

Technické parametre AT51413

Šírka – 34 cm

Maximálna hmotnosť užívateľa – 150 kg

Technické parametre AT51414

Šírka – 33 cm

Maximálna hmotnosť užívateľa – 150 kg



Táto značka znázorňuje maximálnu hmotnosť užívateľa.

Zloženie: PVC

Obsah balenia

Poduška, pumpa, návod

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie.
- 3)) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je potrebné bezodkladne ho odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté vonkajšou mechanickou silou, znečistením výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologickú hrozbu.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Výrobca:

ANTAR Sp. J
I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski
Ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko
Tel. 22 518 36 00
Fax 22 518 36 30
www.antar.net

Výhradný distribútor:

ANMED PLUS s.r.o.
Nádražná 329
015 01 Rajec
Tel. : 041/542 49 16;
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk
WWW: www.anmedplus.sk

