

ZÁRUČNÝ LIST


Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:
ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 1. júna 2022
v1-1 28/06/2022

AT52322 NÁVOD NA POUŽITIE VOZÍK INVALIDNÝ



Pred použitím invalidného vozíka si pozorne prečítajte tento návod. Nesprávne používanie invalidného vozíka môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu. Ak pokynom nerozumiete, kontaktujte svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne úplné vysvetlenie pokynov, upozornení a varovaní. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu.

1.0 BEZPEČNOSTNÉ KONTROLY PRED POUŽITÍM

Odporúčame vám pred každým použitím vykonať bezpečnostnú kontrolu, aby ste sa uistili, že invalidný vozík funguje hladko a bezpečne.

Pred použitím invalidného vozíka vykonajte nasledujúce kontroly:

- Skontrolujte stav pneumatík. Uistite sa, že nie sú poškodené alebo nadmerne opotrebované.
- Skontrolujte všetky brzdy. Uistite sa, že sú funkčné.
- Skontrolujte svoje sedadlo. Uistite sa, že nie je nadmerne opotrebované.

Ak zistíte problém, požiadajte o pomoc autorizovaného predajcu.

VÝSTRAHA! Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

2.0 ŠPECIFIKÁCIA

Maximálna hmotnosť užívateľa: 100 kg

Hmotnosť produktu: 14 kg

Celková dĺžka: 77 ~ 102 cm

Celková výška: 74 ~ 87,5 cm

Celková šírka: 68 cm

Šírka sedadla: 47 cm

Hĺbka sedadla: 42 cm

Výška sedadla: 48 cm

Výška chrbtovej opierky: 44 cm

Predné koleso: 20 cm PVC

Zadné koleso: 59 cm guma

Sklopné operadlo: Áno


Zvýšené laktové opierky: Nie.

Odnímateľné opierky nôh: Áno

Výška opierky nôh: Nastaviteľná

3.0 KOMPONENTY VOZÍKA

1. Rukoväť
2. Čalúnenie sedadiel
3. Čalúnenie operadla
4. Laktová opierka
5. Bočný panel
6. Ručná brzda
7. Odnímateľná opierka nôh
8. Opierka nôh
9. Predná vidlica
10. Predné koleso
11. Zadné koleso

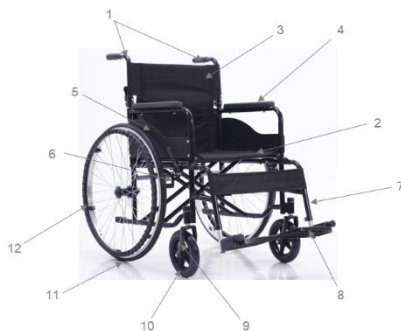

4.0 VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ – UPOZORNENIA PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

VÝSTRAHA! Nedodržanie pokynov popísaných v tomto návode na používanie môže viesť k poškodeniu invalidného vozíka alebo zraneniu užívateľa.

VÝSTRAHA! Vyhňte sa používaniu invalidného vozíka na ceste.

VÝSTRAHA! Invalidný vozík nepoužívajte na piesku, nerovnom teréne alebo na mokrom a klzkom povrchu.

VÝSTRAHA! Nepoužívajte vozík, ak je poškodený alebo nefunguje správne.

VÝSTRAHA! Invalidný vozík nie je vhodný na použitie ako sedadlo v motorovom vozidle. Invalidný vozík sa môže pri náraze poškodiť a zraniť niekoho na vozíku alebo iných ľudí.

VÝSTRAHA! Predtým, ako sa nakloníte alebo natiahnete dopredu, vždy položte zadok na zadnú časť invalidného vozíka a nasmerujte kolieska dopredu.

VÝSTRAHA! Na spomalenie kopca nepoužívajte ručnú brzdú. Náhle zmeny smeru pri jazde z kopca môžu spôsobiť, že sa stanete nestabilným alebo sa prevrátite.

VÝSTRAHA! Nikdy nič nepripájajte ku kolesám. To môže poškodiť invalidný vozík a ovplyvniť jeho rovnováhu a spôsobiť zranenie užívateľa.

VÝSTRAHA! Vždy zabrzďte, keď ste vo výťahu alebo keď chcete vystúpiť.

VÝSTRAHA! Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie a nikdy nepoužívajte vozík na prepravu viac ako jednej osoby.

VÝSTRAHA! Aby bola zabezpečená primeraná ochrana pred potenciálnou prekážkou, opierky nôh by mali mať minimálnu vzdialenosť 7 cm od zeme.

VÝSTRAHA! Nikdy nestojte na stupačkách. To spôsobí prevrátanie invalidného vozíka a zranenie užívateľa (obrázok 4.0.1).

VÝSTRAHA! Invalidný vozík vždy postavte na stabilný, rovný povrch a pred presunom na invalidný vozík alebo z neho zabrzďte.

VÝSTRAHA! Neoprávnené úpravy a/alebo použitie dielov nedodaných dodávateľom ruší platnosť záruky na tento invalidný vozík a môže viesť k zraneniu užívateľa alebo poškodeniu invalidného vozíka.



Obrázok 4.0.1

Indikácie

Invalidný vozík je určený na prepravu osoby so zníženou pohyblivosťou. Vozík je určený na prepravu jednej osoby.

Kontraindikácie

fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. zhoršenie zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

5.0 NÁVOD NA POUŽITIE

5.1 ROZLOŽENIE VOZÍKA

1. Postavte sa vedľa invalidného vozíka.
2. Držte obe trubice pod sedadlom a odsuňte ich od seba.
3. Zatláčajte obe trubky sedadla smerom nadol, aby sa invalidný vozík rozložil. (Obr. 5.1.1)
4. Zablokujte sedlové trubky a skontrolujte, či je čalúnenie sedadla rovné.
5. Pripevnite stupačky, podnožky a rozložte operadlo. Vozík je teraz pripravený na použitie.



Obr 5.1.1

5.2 SKLADANIE VOZÍKA

1. Sklopte operadlo, sklopte podnožku a odstráňte opierky na nohy.
2. Postavte sa vedľa invalidného vozíka
3. Uchopte okraje sedadla v strede čalúnenia sedadla a potiahnite ho priamo nahor. (obr.5.2.1)



br 5.2.1

5.3 SKLADANIE OPIERKY

1. Chrbtovú opierku možno rýchlo a jednoducho zložiť na uskladnenie a prepravu invalidného vozíka.
2. Postavte sa za invalidný vozík a stlačte dve čierne páčky k sebe (obr. 5.3.1) a súčasne sklopte operadlo. .
3. Sklápací mechanizmus je teraz odblokovaný a operadlo môžete úplne sklopíť (obr. 5.3.2).
4. Na zdvihnutie operadla zo sklopenej polohy uchopte obe rukoväte a zdvihnite ich k sebe, aby zapadli na miesto (obr. 5.3.3).



obr. 5.3.1



obr. 5.3.2



obr. 5.3.3

5.4 DEMONTÁŽ OPIERKY NA NOHY

1. Ak chcete odstrániť opierku nôh, postavte sa pred invalidný vozík. Vytiahnite zástrčku smerom nahor (obr. 5.4.1).
2. Vytiahnite stupačky smerom von a vyberte ich z podpier (obr. 5.4.2).



obr 5.4.1



obr 5.4.2

5.5 MONTÁŽ STUPAČKY

1. Na inštaláciu opierky nôh vložte opierku nôh do podpier invalidného vozíka (obr. 5.5.1), zatlačte ju dovnútra.
2. Umiestnite zátku do otvoru na upevnenie opierky nôh (obr. 5.5.2).
3. Skontrolujte, či je opierka nôh pevne pripevnená (obr. 5.5.3).



obr 5.5.1



obr 5.5.2



obr 5.5.3

5.6 SKLADANIE OPIERKY NA NOHY

1. Uchopte prednú časť opierky nôh (obr. 5.6.1).
2. Sklopte podnožku nahor smerom k stupačke (obr. 5.6.2).



obr 5.6.1



obr 5.6.2

7 NASTAVENIE VÝŠKY OPIERKY NA NOHY

1. Uvoľnite maticu pomocou kľúča a posuňte držiak opierky nôh smerom nadol a nastavte opierku nôh do požadovanej výšky. (Obr. 5.7.1)
2. Potom pomocou kľúča úplne utiahnite maticu.
3. Skontrolujte, či sú dve bočné dosky opierky nôh v rovnakej výške.



obr 5.7.1

5.8 PARKOVACIA BRZDA

Pred nastúpením na invalidný vozík, jeho spustením, naklonením sa na invalidný vozík alebo pri preprave vo výťahu alebo výťahu zatiahnite ručnú brzdú na obe kolesá. Skontrolujte, či stupačky pri sklopení neuvolňujú ručné brzdy. Pri správnom nastavení by čelusť ručnej brzdy mala sedieť aspoň 1/8 palca v pneumatike, keď je namontovaná v uzamknutej polohe. Ručné brzdy sa aktivujú zatlačením rukoväte úplne dopredu. Ak chcete nastaviť brzdy, uvoľnite maticu na skrutke vozíka. Posúvajte strmeň smerom k zadnému kolesu, kým brzdová čelusť nebude sedieť aspoň 1/8 palca v pneumatike s rukoväťou zablokovanou v uzamknutej polohe. Uťahnite maticu a skrutku, aby sa zaistili v polohe. PRED skutočným použitím skontrolujte správnu funkciu uzamknutia.



obr. 5.8.1

5.9 POUŽÍVANIE BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU NA VOZÍČKU

Váš invalidný vozík je vybavený bezpečnostným pásom, ktorý môžete použiť nasledovne:

1. Na invalidnom vozíku si môžete bezpečnostný pás zapnúť spojením dvoch voľných koncov k sebe. (Obr. 5.9.1)
2. Ak je pás príliš voľný alebo príliš tesný, môžete ho zaistiť alebo povoliť.
3. Na uvoľnenie bezpečnostného pásu zatlačte na uzamykacie platničky, aby ste ho odistili.



obr 5.9.1

5.10 POZNÁMKA:

Stabilita – Invalidný vozík je navrhnutý tak, aby bol bezpečný a stabilný, pokiaľ vo vozíku udržíte svoje ťažisko. Nikdy nesiahajte po predmetoch, ktoré vyžadujú, aby ste sa posunuli na sedadle alebo sa vyklonili z invalidného vozíka. Kedykoľvek siahnete po predmetoch, pre ktoré je potrebné sa nakloniť, uistite sa, že predné kolesá smerujú dopredu, čím sa rozširuje šírka rozchodu a pomáha stabilizovať invalidný vozík.

Rampy – zistite o svojich vlastných silových a vytrvalostných limitoch a schopnostiach skôr, ako sa pokúsite vyliezť na rampu. Vy a váš asistent by ste mali najskôr konzultovať s kvalifikovaným odborníkom správne techniky vychádzania na rampu. Pomôcka sa odporúča pri stúpaní alebo klesaní strmých stúpaní väčších. Ak je potrebné zastaviť na svahu, vyhnite sa náhlým, prudkým pohybom dopredu, keď sa invalidný vozík opäť dostane do pohybu. Vzhľadom na to, že stolička je naklonená dozadu, môžu náhle, trhavé pohyby spôsobiť jej nestabilitu. Pri pokuse o použitie brzd s blokovaním kolies môže dôjsť k náhodnému zablokovaniu, krúteniu alebo nakloneniu na jednu stranu alebo k náhlemu zastaveniu. Vyhnite sa zmene smeru pri jazde z kopca, pretože to môže spôsobiť nestabilitu.

6.0 ÚDRŽBA A MESAČNÁ KONTROLA

Dôrazne sa odporúča, aby ste vozík raz ročne odviezli k dodávateľovi na dôkladnú kontrolu a údržbu/opravu.

Všeobecná starostlivosť - Očistite všetky kovové časti autoskosom alebo podobnými prípravkami. Ak je vozík vystavený vlhkosti, ihneď ho vysušte. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ktoré môžu poškriabať povrch stoličky.

Mesačné kontroly: Skontrolujte celý invalidný vozík, či nemá poškodené časti a uvoľnené upevňovacie prvky. V prípade potreby vymeňte alebo dotiahnite.

Predné a zadné pneumatiky – Pevné pneumatiky vyžadujú minimálnu údržbu, ale mali by sa z času na čas vyčistiť vlhkou handričkou. Vymeňte pneumatiky, ak sú prasknuté alebo veľmi opotrebované.

Predné a zadné kolesá – skontrolujte, či kolesá nemajú zdeformované a zlomené špice. Skontrolujte tiež, či sú ložiská v dobrom stave a či sa kolesá voľne otáčajú.

Predné vidlice - Skontrolujte, či sa vidlice voľne otáčajú bez viazania. Ak sa zasekne, skontrolujte ložiská a vyčistite kryt hriadeľa vidlice. Ak je matica príliš voľná, koleso sa bude trepať alebo skákať. Ak je príliš tesný, bude ťažké kočík riadiť.

Kolesá - Skontrolujte správne utiahnutie veľkých zadných kolies. Ak sa koleso kýva alebo je uvoľnené, ložiská môžu byť opotrebované. Odneste invalidný vozík miestnemu dodávateľovi na opravu.

Rám – Skontrolujte, či rám nie je ohnutý alebo preliačený. Skontrolujte, či rúrky nie sú prasknuté a hrdzavé. Ak zistíte takéto problémy, odveďte invalidný vozík k miestnemu poskytovateľovi služieb. Vyčistite a jemne naolejujte tri zadné nápravy na každej strane rámu, aby ste predišli hrdzi. Plastové zátky by mali byť umiestnené na nápravách, keď sa nepoužívajú.

7.0 ZÁRUKA

7.0 ZÁRUKA

Táto záruka sa vzťahuje iba na pôvodného kupujúceho. Pred poskytnutím akéhokoľvek záručného servisu sa bude vyžadovať váš originálny účtenky ako dôkaz o kúpe.

Vozík bol vyrobený podľa prísnych noriem a pred odoslaním bol dôkladne skontrolovaný. Na výrobok sa poskytuje záruka na chyby materiálu a spracovania po dobu dvoch rokov od dátumu kúpy. Poskytovateľ garantuje doživotnú záruku na bočné rámy a križové výstupy. Ak sa počas záručnej doby zistí chyba výrobku, bude to: buď opravené alebo vymenené podľa uváženia dodávateľa.

Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy zariadenia spôsobené nesprávnym používaním alebo nedbalosťou majiteľa alebo bežným opotrebovaním. Záruka sa nevzťahuje na predmety, ktoré nie sú trvanlivé, vrátane, ale nie výlučne: gumených doplnkov, kolies, rukovätí a čalúnenia, podložiek laktových opierok, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu a vyžadujú si pravidelnú výmenu.

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenia spôsobené nepovolenými dielmi, prílohami alebo opravou, zanedbaním, nehodou alebo akýmkoľvek okolnosťami, ktoré dodávateľ nemôže ovplyvniť, ako je nesprávna obsluha, údržba alebo skladovanie.

Ak máte otázku týkajúcu sa produktu dodávateľa alebo tejto záruky, obráťte sa na dodávateľa.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby
- vážne ohrozenie verejného zdravia

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov spojených v súvislosti s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

POZNÁMKA: Skontrolujte všetky diely, či nie sú poškodené pri preprave. Ak zistíte akékoľvek takéto poškodenie, výrobok NEPOUŽÍVAJTE. Viac informácií od výrobcu.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením

POZNÁMKA: Pred použitím skontrolujte, či sú všetky komponenty správne zmontované.

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nedostatočným servisom alebo nedodržaním odporúčaní uvedených v tomto návode.

UPOZORNENIE: Pri nesprávnom používaní môže hroziť riziko prevrátenia. Prosím, dodržujte pokyny pre nastupovanie/vystupovanie/premiesťovanie.

UPOZORNENIE: Pri používaní a manipulácii s výrobkom, ako aj pri montáži a nastavovaní mechanizmov môže hroziť riziko zachytenia a/alebo privretia častí tela užívateľa/sprevádzajúcej osoby v otvoroch/medzerách medzi prvkami. Tieto kroky by sa mali vykonávať s mimoriadnou opatrnosťou. Po dokončení nastavenia stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matíc / skrutiek

Obsah balenia

Invalidný vozík, opierky nôh, oporný pás na lýtka, návod na použitie.

Čas použiteľnosti

Na základe vykonaných testov výrobca udáva 5-ročnú trvanlivosť zdravotníckej pomôcky.



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť užívateľa.