

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté vonkajšou mechanickou silou, znečistením výrobku masnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologickú hrozbu.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Výrobca:

ANTAR Sp. J
I. Groniecka-Tarnkowska, A. Tarnkowski
Ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko
Tel. 22 518 36 00
Fax 22 518 36 30
www.antar.net

Výhradný distribútor:

ANMED PLUS s.r.o.
Nádražná 329
015 01 Rajec
Tel. : 041/542 49 16; Fax: 041/542 49 16
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk
WWW: www.anmedplus.sk



NÁVOD NA POUŽITIE ORTÉZA KOLENA AT53039



AT53039 Ortéza kolena

Ortéza kolenného kĺbu so špirálovými bočnými výstužami a silikónovým posilnením pately, vyrobená z priedušnej textílie spevňuje kĺb, poskytuje kompresiu, stabilizuje a jemne ohrieva kolenný kĺb.

Indikácie:

- Patelárny väz (jumperovo koleno)
- Rehabilitácia po rôznych úrazoch kolena
- Preventívne opatrenie v prípade oslabenia kolena
- Mierne výrony v kolennom kĺbe

Funkcie:

- Ortéza zaisťuje fungovanie kĺbu v kontrolovanom, optimálnom anatomickom rozsahu pohybu
- Špirálové výstuže poskytujú dodatočnú stabilitu, jemnú masáž, uvoľňujú kĺb, zabezpečujú lepšiu prilnavosť ortézy a uľahčujú jej nasadenie (výstuže nie je možné vytiahnuť)
- Silikónové vystuženie zaisťuje stabilizáciu pately a zabraňuje jej patologickým deformáciám

Ortéza sa nasadí jej natiiahnutím cez nohu.

Dĺžka ortézy: 30 cm

Pokyny na čistenie produktu:

- Ručné pranie vo vode jemným mydlom pri teplote 30 °C alebo nižšej.
- Nepoužívať bielidlo.
- Nežehliť, nesušiť v sušičke.
- Sušiť na vzduchu, vyhnúť sa priamemu kontaktu so slnkom alebo iným zdrojom tepla

Upozornenia: Nepoužívať výrobok spolu so zahrievajúcimi olejmi alebo masťami. Nepoužívať v prípade poškodenia pokožky.

Výber správnej veľkosti: zmerajte obvod kolena v strednej časti v stoj.

Dostupné veľkosti:

S: 28,6 - 35,7 cm

M: 35,7 - 41,7 cm

L: 41,7 - 47,6 cm

XL: 47,6 - 55,2 cm

XXL: 55,2 – 62,9 cm

