

NÁVOD NA POUŽITIE

AT53041 ORTÉZA ČLENKA

AT53040 ORTÉZA KOLENA



MD



VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE Nepoužívajte výrobok, kým si neprečítate a nepochopíte tento návod. Ak nerozumiete akýmkoľvek varovaniám, upozorneniam alebo pokynom, obráťte sa na svojho lekára alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu produktu.

POZNÁMKA: Skontrolujte produkt, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Ak zistíte akékoľvek takéto poškodenie, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Viac informácií u výrobcu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Ortéza AT53041 vďaka jedinečnej kombinácii materiálu Power Mesh a inovatívnej pásky Power-Band poskytuje podporu, vynikajúcu odolnosť, flexibilitu a pohodlie, ako aj vhodné prispôsobenie, vnútorná vrstva z priedušného silikónu udržiava členok v správnej polohe. Poskytuje silnú a účinnú podporu ochabnutým svalom a kĺbom a predchádza zraneniam. Produkt je navrhnutý tak, aby poskytoval maximálnu podporu pri zachovaní pohodlného nosenia. Produkt je vhodný ako na každodenné nosenie, tak aj na športové využitie. Je dôležité zvoliť správnu veľkosť, aby ste zabezpečili maximálny úžitok a vyhlížali prílišnej kompresii. Ak sa ortéza používa po úraze, ak nedôjde k zlepšeniu do 72 hodín, navštívte svojho lekára. Ak je zranenie vážne alebo ak máte nejaké pochybnosti, ihneď navštívte svojho lekára. Pri používaní deťmi je potrebný dozor dospelých osôb. Uchovávajte mimo dosahu malých detí.

VLASTNOSTI PRODUKTU AT53041:

- Ultra tenký, priedušný materiál poskytuje podporu a jemnú kompresiu pre celodenné pohodlie pri nosení.
- Poskytuje primeranú oporu členkovej šľache a väzu, zvyšuje propriocepciu pri pohybe.
- Nastaviteľný popruh poskytuje pohodlie a podporu členku a Achillovej šľache.
- Poskytuje podporu hlavnému bočnému väzu členka a zabraňuje krúteniu členkového kĺbu.
- Pomáha pri rýchlej regenerácii.
- Znižuje bolesť členkov.
- Jednoduché nasadzovanie a vyzliekanie.

INDIKÁCIE AT53041:

- poranenia členkového kĺbu,
- ochorenia členkového kĺbu,
- rehabilitácia po rôznych ochoreniach členkového kĺbu,
- preventívne opatrenie v prípade slabosti členkového kĺbu,
- posttraumatické zmeny,
- počas rehabilitačného obdobia po operácii.

VLASTNOSTI PRODUKTU AT53040:

- Ultra tenký, priedušný materiál poskytuje podporu a jemnú kompresiu pre celodenné pohodlie pri nosení.
- 3D strih poskytuje zreteľné prispôsobenie a štíhly vzhľad nohy.
- Silikónový Power-Band poskytuje dodatočnú kompresiu kolenného kĺbu a zvyšuje propriocepciu počas pohybu.
- Zakrýva hornú časť lýtky a znižuje svalové vibrácie.
- Silikónový protišmykový vzor BreathGrip účinne zabraňuje posunutiu ortézy, nezanecháva žiadne odtlačky na koži a stimuluje propriocepciu v kontaktných bodoch s ortézou.
- Poskytuje podporu / stabilitu kolenného kĺbu s úplnou voľnosťou pohybu kolena.
- Pomáha dosiahnuť rýchlu regeneráciu.
- Znižuje bolesť v kolene.

INDIKÁCIE AT53040:

- poranenia kolena,
- ochorenia väziva, pately,
- rehabilitácia po rôznych ochoreniach kolenného kĺbu,
- preventívne opatrenie v prípade slabosti kolena,
- posttraumatické zmeny,
- počas rehabilitačného obdobia po operácii.

KONTRAINDIKÁCIE:

- ak sa u vás objaví bolesť alebo vyrážka, okamžite prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom

MATERIÁL: Látka: 85,2 % nylon, 14,8 % elastan, páska: 100 % silikón

NÁVOD NA ČISTENIE PRODUKTU:

- Ortézu je možné prať iba ručne vo vlažnej vode (do 40°C) s pridaním jemného pracieho prostriedku (napr. šedé mydlo).
- Nežehlite.
- Nečistite na sucho.
- Nepoužívajte bielicidlo.
- Chráňte pred vlhkosťou.
- Nevystavujte vysokým teplotám.
- Nesušte v sušičke.
- Sušte rozložené.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení použitia medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad s výnimkou elektrických výrobkov – vtedy postupovať spôsobom zodpovedajúcim likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

POUŽITIE:

Ortéza sa nasadzuje pretiahnutím cez nohu.

DOSTUPNÉ VEĽKOSTI AT53041: Na určenie správnej veľkosti zmerajte obvod členkového kĺbu:

S: 17-22 cm,
M: 21-25 cm,
L: 24-29 cm.

DOSTUPNÉ VEĽKOSTI AT53040: Na určenie správnej veľkosti zmerajte obvod 14 cm nad kolonom:

S - 39-45 cm
M - 42-48 cm
L - 45-51 cm
XL-48-54 cm
XXL - 51-57 cm

UPOZORNENIE: Ak máte cukrovku alebo zlý krvný obeh, pred použitím produktu sa poraďte so svojím lekárom. Ak kedykoľvek pocítite bolesť, vyrážku alebo zvýšenú bolesť, prerušte používanie a poraďte sa so svojím lekárom.

UPOZORNENIE: výrobok nepoužívajte, ak ste použili zahrievacie gély alebo masť, nepoužívajte v prípade poškodenia pokožky!

POZNÁMKY:

- Pred nasadením ortézy si pozorne prečítajte tieto pokyny.
- Pred každým použitím sa uistite, že ortéza nevykazuje žiadne poškodenia na švoch.
- Používanie výrobku v rozpore so zásadami obsiahnutými v návode môže mať za následok vážne komplikácie.

- Ortéza by sa mala používať podľa pokynov lekára alebo fyzioterapeuta.
- Ortéza by sa nemala používať v prípade otvorených rán, odrenín epidermy a po predchádzajúcej aplikácii hrejivého gélu alebo masti.

UPOZORNENIE: Horľavý.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené zanedbaním údržby, nedostatočným servisom alebo nedodržaním odporúčaní obsiahnutých v tomto návode.

ŽIVOTNOSŤ

Na základe vykonaných testov výrobca udáva 5-ročnú trvanlivosť zdravotníckej pomôcky.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 16.09.2022

v1-1 16.09.2022