

NÁVOD NA POUŽITIE

KOMPRESOROVÝ INHALÁTOR



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok, pozorne si prečítajte návod na použitie. Nepoužívajte výrobok, kým si neprečítate a neporozumiete tomuto návodu. Ak nerozumiete výstrahám, upozorneniam a odporúčaniam, obráťte sa na svojho zdravotníckeho pracovníka alebo predajcu, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.

POZNÁMKA: Skontrolujte všetky diely, či neboli poškodené pri preprave. Ak takéto poškodenie zistíte, výrobok NEPOUŽÍVAJTE. Ďalšie informácie získate od výrobcu.

POUŽITIE/INDIKÁCIE

Inhalátor je určený na inhaláciu počas liečby rôznych ochorení dýchacích ciest vrátane astmy alebo ochorení priedušiek a pľúc. Inhalátor je tichý a ľahko použiteľný rozprašovač pre celú rodinu, určený na podporu liečby dolných dýchacích ciest. Malá veľkosť produkovaných častíc znamená, že liek ľahko preniká do pľúc a usadzuje sa v ich alveolách, čím zaručuje vysokú účinnosť.

KONTRAINDIKÁCIE

Fyzické alebo mentálne obmedzenia (napr. poruchy zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii.

KOMPONENTY: Skriňa kompresora, Kryt, Vzduchové otvory, Vypínač, Napájací kábel, Odkladací priestor (na príslušenstvo), Výstup vzduchu, Rukoväť

ŠPECIFIKÁCIE:

Typ: pneumatický
Napájacie napätie 220 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz
Spotreba energie: 180 VA
Objem rozprašovača: 6 ml
Veľkosť častíc: inhalovateľná frakcia 0,5 až 5 µm 80%
MMAD: 2,0 µm
Priemerná rýchlosť inhalácie: viac ako 0,2 ml/min.
Objem: < 60 Db
Tlak kompresora: 30-45 psi
Prevádzkový tlak: 12-45,5 psi (0,85-1,1 bar)
Prietoková rýchlosť: 8-10 l/min

OBSAH BALENIA: inhalátor, náustok, hadička, detská maska, maska pre dospelých, vzduchový filter (5 kusov).

POZNÁMKY:

- Zariadenie nepoužívajte v prítomnosti anestetík, horľavých zmesí alebo kyslíka.
- Nesprávna prevádzka spotrebiča môže spôsobiť elektromagnetické rušenie, ktoré prekračuje limity uvedené v platných európskych normách. Ak spotrebič ruší prevádzku iného elektrického spotrebiča, je potrebné ho odpojiť a pripojiť do inej elektrickej zásuvky.
- V prípade poruchy alebo zlyhania by sa skriňa kompresora nemala otvárať, pretože nejde o samoobslužný výrobok.

Použitie neoriginálnych náhradných dielov, napr. filtra, môže spôsobiť poruchu prístroja.

Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať určité bezpečnostné pravidlá, ako napríklad:

- používajte iba originálne diely a komponenty
- neponárajte zariadenie do vody, nie je vodotesné
- nedotýkajte sa spotrebiča mokkými/vlhkými rukami
- nenechávajte spotrebič vonku
- spotrebič musí byť počas prevádzky stabilný na rovnom povrchu
- skontrolujte, či nie sú zablokované vetracie otvory.
- nedovoľte deťom bez sprievodu používať spotrebič
- nevypínajte spotrebič vytiahnutím zástrčky zo zásuvky

- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že elektrické napätie uvedené na typovom štítku na spodnej strane spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej zásuvke.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani rozdeľovače
- Nenechávajte zástrčku spotrebiča v zásuvke, keď sa spotrebič nepoužíva. Keď spotrebič nepoužívate, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Inštalácia jednotky sa musí vykonať v súlade s pokynmi. Výrobca nezodpovedá za nesprávnu inštaláciu.
- Používateľ nesmie vymeniť napájací kábel./ Ak je kábel poškodený, kontaktujte zákaznícky servis/servis.
- Napájací kábel by mal byť vždy úplne natiiahnutý kvôli možnosti nebezpečného prehriatia.
Pred čistením alebo výmenou filtra odpojte prístroj od hlavného zdroja napájania len vytiahnutím zástrčky zo zásuvky alebo hlavného vypínača.
- Niektoré časti spotrebiča sú malé a deti ich môžu prehltnúť. Deťom bez dozoru a osobám so zdravotným postihnutím by sa mala zabrániť v prístupe k spotrebiču.
- Ak sa používateľ rozhodne zariadenie nepoužívať, odporúča sa zlikvidovať ho v súlade s miestnymi predpismi.
 - Upozorňujeme, že zariadenie sa môže používať len s liekmi predpísanými lekárom bez toho, aby ste si lieky vybrali sami.
 - Môžu sa používať len tie, ktoré odporučil lekár a ktoré sú potrebné na liečbu.
 - Je dôležité skontrolovať, či sa lieky predpísané lekárom môžu používať s bežne dostupnými kompresnými rozprašovačmi na aerosólovú liečbu.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

UPOZORNENIE: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nedbalým čistením a údržbou alebo v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.

CIELOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozri časť o určenom použití pomôcky v tomto návode na použitie). Zariadenie si môže užívateľ zakúpiť samostatne alebo na odporúčanie lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie a varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania a informácie poskytnuté výrobcom.

POUŽÍVANIE

1. Pred prvým použitím skontrolujte, či zariadenie nebolo poškodené počas prepravy. Počas terapie sa posadíte vzpriamene a uvoľnene.
2. Pred použitím prístroja ho vyčistite podľa popisu v časti "ČISTENIE A ÚDRŽBA".
3. Otvorte rozprašovač otočením hornej časti proti smeru hodinových ručičiek.
4. Uistite sa, že je prepážka nastavená v správnej polohe vo vnútri komory rozprašovača.
5. Vložte pridelené množstvo lieku do nádoby na lieky.
6. Zatvorte rozprašovač tak, že zariadenie držíte za spodnú časť a otáčate hornou časťou v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že je zariadenie pevne zatvorené.
7. Jeden koniec vzduchovej hadičky pripojte k rozprašovaču a druhý koniec k výstupu vzduchu zo zariadenia.
8. Pripojte uhlový náustok k rozprašovaču.
9. Ak sa používa maska, odpojte uhlový náustok a pripojte masku priamo k rozprašovaču.
10. Zapojte kompresor do elektrickej zásuvky.
11. Ak chcete spustiť terapiu, zapnite zariadenie nastavením tlačidla do polohy "I".

POZOR: CYKLUS ZARIADENIA: 30MIN ZAPNUTIE/30MIN VYPNUTIE

12. Po skončení terapie vypnite zariadenie zmenou polohy tlačidla na "0" a odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.

DOPLNKOVÁ FUNKCIA

Rozprašovač možno stabilne pripojiť k hlavnej jednotke tak, že ho zasuniete do otvoru



ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Čistenie kompresora: Vonkajšiu časť jednotky čistite suchou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom.

POZNÁMKA: Pred čistením sa uistite, že je napájací kábel odpojený od siete, a počas čistenia zabezpečte, aby vnútorné časti neprišli do kontaktu s kvapalinami.

Po každom ošetrení rozprašovač vyčistite:

Rozprašovač sa môže čistiť tekutým mydlom a vodou a potom dezinfikovať vriacou vodou (max. 10 min.). Masku a uhlový náustok sa odporúča dezinfikovať studenými dezinfekčnými tekutinami. Rozprašovač osušte čistou handričkou.

UPOZORNENIE: Uhlový náustok, vzduchovú trubicu ani masku nečistite vo vriacej vode ani v autokláve.
POZNÁMKA: Je dôležité dodržiavať pokyny na čistenie, aby sa zabezpečila optimálna prevádzka jednotky.

Výmena rozprašovača:

Nebulizátor by sa mal vymeniť po dlhšom používaní alebo ak je upchatý zaschnutými liekmi. Pri bežnom používaní by mal nebulizátor zostať v prevádzke najmenej 6 mesiacov.

Výmena filtra:

Filter by sa mal vymeniť približne po 30 hodinách používania alebo keď vyzerá znečistený. Otvorte držiak filtra, potom vyberte starý filter a vložte nový.



Zariadenie nepoužívajte bez filtra.

RIEŠENIE PROBLÉMOV;

1. zariadenie sa nezapne:

- skontrolujte, či je zástrčka správne pripojená k napájaciemu zdroju
- zabezpečte, aby spotrebič pracoval v rámci svojich prevádzkových limitov (30 min vypnuté/30 min zapnuté).

2. zariadenie nestrieka alebo strieka zle:

- Uistite sa, že konce vzduchovej trubice sú pevne pripojené k hlavnej jednotke a k rozprašovaču.
- skontrolujte, či rozprašovač nie je prázdny alebo preplnený liekom (max. 6 ml).
- skontrolujte, či nie je tryska rozprašovača zablokovaná
- skontrolujte, či je priehradka správne umiestnená.

ÚDRŽBA A OPRAVA

Spotrebič sa nesmie otvárať. Prístroj neobsahuje žiadne časti, ktoré by sa dali opraviť. Kompresor nevyžaduje žiadnu údržbu.

SKLADOVANIE: Výrobok skladujte v suchej a chladnej miestnosti, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Tento výrobok je elektroodpad - zaobchádzajte s ním spôsobom vhodným na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawiańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 17.04.2024
v1-17.04.2024