

MADLA ZÁCHYTNÉ

POUŽITIE

Záchytné madlo tvorí súčasť radu kompenzačných pomôcok pre telesne postihnuté osoby a osoby so zníženou schopnosťou mobility. Svoje využitie nachádza najmä tam, kde pacient vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu nie je schopný bez pomoci použiť štandardnú vaňu, sprchový kút, toaletu a pod.. Madlo uľahčuje pacientom bežné úkony osobnej hygieny a zároveň eliminuje možné riziko pri týchto úkonoch a zvyšuje vlastnú sebestačnosť.

OPIS

Madlo je vyrobené z povrchovo upravených oceľových trubiiek vysokej pevnosti a na oboch stranách je zakončené hlavicami, ktoré slúžia na uchytanie madla do nosnej konštrukcie. Farebné prevedenie biele.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

U-200 200x95 mm

U-300 300x95 mm

U-400 400x95 mm

U-500 500x95 mm

U-600 600x95 mm

U-700 700x95 mm

U-800 800x95 mm

U-900 900x95 mm

U-1000 1000x 95 mm

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pred inštaláciou a používaním madla si pozorne prečítajte návod na použitie a v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte vášho dodávateľa. Pred používaním madla konzultujte jeho vhodnosť s ošetrojúcim lekárom. Pri upevňovaní madla k vani postupujte opatrne, aby nedošlo k zachyteniu a úrazu prstov.

Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame doplniť madlo protišmykovou podložkou a stupienkom k vani.

UPEVNENIE MADLA

Madlo sa pripevňuje skrutkami do nosnej konštrukcie. Pre upevnenie použite samorezné skrutky o priemere 3,5 mm a hmoždenky zvolte podľa druhu materiálu steny, do ktorej chcete upevniť madlo.

ÚDRŽBA

Madlo je možné čistiť a udržiavať umývaním vodou, použitím bežných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá a nespôsobujú mechanické narušenie povrchu. Po použití alebo následnom očistení madlo riadne osušte. Pre zachovanie maximálnej stability odporúčame pravidelne kontrolovať pevnosť pripevnenia, popr. odstrániť mechanické nečistoty všetkých častí.

SERVIS A OPRAVY

V prípade nutnosti odstránenia poruchy alebo vykonanie servisu, vždy kontaktujte predajcu, ktorý Vám poskytne všetky informácie.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia pomôcky a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenia, spôsobeného obvyklým používaním.

Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, oprave, nastavenia alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom, než spoločnosťou ANMED PLUS sro alebo predávajúcim.

VÝROBCA:

ANTAR Sp. J. ,Zawiślańska 43 , 09-068 Warszawa

VÝHRADNÝ DOVOZCA:

ANMED PLUS, s.r.o.

Nádražná 329, 015 01 Rajec

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk

www.anmedplus.sk

