

## MADLO ZÁCHYTNÉ

### POUŽITIE

Záchytné madlo tvorí súčasť radu kompenzačných pomôcok pre telesne postihnuté osoby a osoby so zníženou schopnosťou mobility. Svoje využitie nachádza najmä tam, kde pacient vzhľadom k svojmu zdravotnému stavu nie je schopný bez pomoci použiť štandardnú vaňu, sprchový kút, toaletu a pod.. Madlo uľahčuje pacientom bežné úkony osobnej hygieny a zároveň eliminuje možné riziko pri týchto úkonoch a zvyšuje vlastnú sebestačnosť.

### OPIS

Madlo je vyrobené z povrchovo upravených oceľových trubiek vysokej pevnosti a na oboch stranách je zakončené hlavicami, ktoré slúžia na uchytenie madla do nosnej konštrukcie. Farebné prevedenie biele.

### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Pred inštaláciou a používaním madla si pozorne prečítajte návod na použitie a v prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte vášho dodávateľa.

Pred používaním madla konzultujte jeho vhodnosť s ošetrojúcim lekárom.

Pri upevňovaní madla k vani postupujte opatrne, aby nedošlo k zachyteniu a úrazu prstov.

Pre väčšiu bezpečnosť odporúčame doplniť madlo protišmykovou podložkou a stupienkom k vani.

### UPEVNIENIE MADLA

Madlo sa pripevňuje skrutkami do nosnej konštrukcie. Pre upevnenie použite samorezné skrutky o priemere 3,5 mm a hmoždienky zvolte podľa druhu materiálu steny, do ktorej chcete upevniť madlo.

### ÚDRŽBA

Madlo je možné čistiť a udržiavať umývaním vodou, použitím bežných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá a nespôsobujú mechanické narušenie povrchu. Po použití alebo následnom očistení madlo riadne osušte.

Pre zachovanie maximálnej stability odporúčame pravidelne kontrolovať pevnosť pripevnenia, popr. odstrániť mechanické nečistoty všetkých častí.

### ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia pomôcky a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenia, spôsobeného obvyklým používaním.

Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, oprave, nastavení alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom, než spoločnosťou ANMED PLUS sro alebo predávajúcim.

### VÝROBCA:

ANTAR Sp. J. , Zawiślańska 43, 09-068 Warszawa

### VÝHRADNÝ DOVOZCA:

ANMED PLUS, s.r.o.

Nádražná 329, 015 01 Rajec

E-mail: [anmedplus@anmedplus.sk](mailto:anmedplus@anmedplus.sk)

[www.anmedplus.sk](http://www.anmedplus.sk)

