



NÁVOD NA POUŽITIE

Výrobca: AN TAR Sp. J.
I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski
ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa
Poľsko

Názov zdravotníckej pomôcky: **Kreslo toaletné AT51091**

Obsah balenia: 1 ks
Údaj o použiteľnosti: Na opakované použitie
Nesterilná zdravotnícka pomôcka
Dátum vydania návodu na použitie: 26.3.2018



Prečítajte si návod na použitie toto produktu
pred začatím jeho používania.

POPIS:

- Materiál: vysoko kvalitný hliník
- Sedadlo: 45 x 42 x 35 cm
- Nádoba: 6 x 22 cm
- Maximálna hmotnosť užívateľa: 90 kg

NÁVOD NA MONTÁŽ:

1. Táto stolička s vedrom má jednoduchý montážny systém.
2. Najskôr umiestnite nohy do zodpovedajúcich častí hlavnej konštrukcie a nastavte ich pomocou fixačných klipov.
3. Potom vložte vedro do stredu hlavnej konštrukcie.
4. Nakoniec umiestnite sedadlo na vrch vedra a napokon veko (ktoré je osadené pomocou tlaku).



UPOZORNENIA:

- Používajte kreslo iba na rovnej a stabilnej podlahe.
- Pred použitím sa uistite, že je kreslo správne zmontované.
- Vždy sedte uprostred kresla.
- Uistite sa, že všetky nohy sú nastavené na rovnakú výšku.

ZÁRUKA:

Záruku poskytujeme po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia pomôcky a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenia spôsobeného obvyklým používaním. Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, oprave, nastavení alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom, než spoločnosťou ANMED PLUS, s.r.o. alebo predávajúcim.

Výhradný distribútor:

ANMED PLUS s.r.o.
Nádražná 329, 015 01 Rajec
Tel./fax: 041 542 49 16
www.anmedplus.sk

