

AT52313

ELEKTRICKÝ INVALIDNÝ VOZÍK NÁVOD NA POUŽITIE



MD



SK

Pred prvým použitím elektrického invalidného vozíka si prečítajte a dodržiavajte všetky informácie, varovania a upozornenia v tomto návode. Ak v tejto príručke niečomu nerozumiete alebo ak potrebujete ďalšiu pomoc s inštaláciou alebo prevádzkou, obráťte sa na svojho predajcu alebo výrobcu.

Bezpečné používanie produktu závisí od dodržiavania informácií, upozornení a varovaní obsiahnutých v tomto návode. Nezodpovedáme za žiadne škody a/alebo zranenia vyplývajúce z používania produktu nebezpečným spôsobom alebo z nedodržiavania pokynov, upozornení a varovaní uvedených v tomto návode.

UPOZORNENIE Nedodržanie upozornení a poznámok uvedených v tejto príručke môže viesť k zraneniu osôb a poškodeniu elektrického invalidného vozíka.

1. ÚVOD

Pre vašu vlastnú bezpečnosť si pri prvom použití elektrického invalidného vozíka prečítajte a prísne dodržiavajte tieto pokyny. Tieto pokyny sú mimoriadne dôležité. Pochopenie pokynov je nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku invalidného vozíka.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA.

- Opatrne manipulujte s obrubníkmi a zatáčaní v kopcach.
- Vyhýbajte sa strmým a nerovným povrchom, pretože to môže spôsobiť prevrátenie invalidného vozíka.
- Vyhýbajte sa veľmi mäkkým povrchom, pretože sa môžu kolesá zaboriť.
- Pohybujte invalidným vozíkom za každých podmienok plynule.
- Vždy majte obe nohy na stupačkách a uistite sa, že oblečenie je správne uložené a neblokuje kolesá.
- Na stúpaniach jazdite vždy opatrne.
- Vždy držte obe ruky na rukovätiach, aby ste invalidný vozík správne ovládali (pre asistenta).
- Vždy pamätajte na udržiavanie rovnováhy.
- Pravidelne kontrolujte komponenty invalidného vozíka a počas záručnej doby a po nej sa vždy riadte pokynmi v tomto návode.
- Invalidný vozík držte mimo dosahu zdrojov ohňa
- Vozík nesmie byť v žiadnom prípade preťažený.
- Na zadnú časť vozíka nevešajte žiadne ťažké predmety, pretože to môže ovplyvniť stabilitu vozíka, najmä pri stúpaní do kopcov.
- Invalidný vozík môže používať iba jedna osoba.
- Nepoužívajte invalidný vozík, keď je pacient v bezvedomí.
- Na tlačenie invalidného vozíka nepoužívajte iné dopravné prostriedky.
- Počas jazdy nezdvíhajte predné kolesá, pretože to môže spôsobiť pád a vážne zranenie.
- Nenastupujte do invalidného vozíka, keď sa pohybuje.
- Nehýbte invalidným vozíkom príliš rýchlo a neatáčajte sa náhle.
- Pri nastupovaní a vystupovaní z invalidného vozíka nestojte na stupačkách.
- Nepokúšajte sa zdvihnúť invalidný vozík s pohyblivými (odnímateľnými) časťami. Zdvíhanie s pohyblivými časťami invalidného vozíka môže viesť k zraneniu používateľa a/alebo opatrovateľa alebo k poškodeniu invalidného vozíka.
- Nepoužívajte vozík so sklopeným operadlom. To zmení ťažisko invalidného vozíka a môže spôsobiť prevrátenie invalidného vozíka dozadu. Operadlo by sa malo sklopiť iba pri skladovaní alebo preprave vozíka.

KOMENTÁRE:

Elektrický invalidný vozík nie je určený na použitie v nasledujúcich prípadoch:

- (1) V prípadoch zakázaných v tomto návode, ako je jazda na strmých svahoch, cez príliš veľké prekážky, na diaľnici, v jazdných pruhoch pre motorové vozidlá.
- (2) Na niektorých miestach alebo na určitých povrchoch, napríklad naklonený povrch pokrytý mokrou trávou, kde môžu kolesá sklzávať.
- (3) Keď je potrebné opraviť riadiaci systém alebo iné dôležité časti.

POZNÁMKA: Skontrolujte všetky diely, či nie sú poškodené pri preprave. Ak spozorujete takéto poškodenie, výrobok **NEPOUŽÍVAJTE**. Viac informácií u výrobcu.

POZNÁMKA: Ak sa výrobok používa nesprávne, hrozí riziko prevrátenia. Prosím, dodržujte pokyny pre nastupovanie/vystupovanie/premiestňovanie.

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE: Je zakázané používať výrobok iným spôsobom, než na aký je určený!

Použitie: Výrobok je určený na pohodlnú prepravu osôb s obmedzenou alebo žiadnou schopnosťou chôdze. Invalidný vozík je určený na prepravu jednej osoby

Kontraindikácie: fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. porucha zraku), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s invalidným vozíkom.

SKLADOVANIE

Výrobok by sa mal skladovať v suchej a chladnej miestnosti, mimo dosahu vlhkosti a priameho slnečného žiarenia.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (viď časť týkajúcu sa účelu použitia pomôcky v tomto návode). Produkt si môže používateľ zakúpiť sám alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie/rozmary/varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

2. POPIS PRODUKTU

Elektrický invalidný vozík sa skladá z niekoľkých častí: Rám pozostáva z komponentu, ktorý možno zložiť pre pohodlné skladovanie alebo prepravu. Elektronický riadiaci systém pozostáva z ovládacieho panela, batérie, dvoch motorov, sústavy pohonných mechanizmov a otočných kolies. Pod sedadlom sa nachádza batéria 24 V 12 AH a jej ochrana proti preťaženiu. Zásuvka na nabíjanie batérie sa nachádza na zadnej strane ovládacieho panela. Invalidný vozík je vybavený brzdovou pákou na hnacom mechanizme. Vhodný pohyb páky spôsobí zastavenie elektrického vozíka. Okrem toho je výrobok vybavený „fúzmí“ proti prevráteniu.

3. TECHNICKÉ PARAMETRE

Celková veľkosť (dĺžka x šírka x výška): 1090 mm x 640 mm x 1350 mm

Výška sedadla: 540 mm

Šírka sedadla: 430 mm

Hĺbka sedadla: 440 mm

Výška laktovej opierky: 200 mm

Výška chrbta: 800 mm

Hmotnosť batérie: 2,5 kg

Hmotnosť invalidného vozíka s batériou: 37 kg

Maximálna rýchlosť: 6 km/h

Brzdná dráha pri 6 km/h: ≤ 1500 mm

Maximálny polomer otáčania: ≤ 1200 mm

Maximálna nosnosť: 120 kg

Dojazd: 20 km

Statická stabilita: ≥9°

Dynamická stabilita: ≥6°

Prípustné prevýšenie: 6°

Motory: 24V / 250W x 2

Batéria: 24V/120Ah x 1

Maximálny výstupný prúd ovládacieho panela: 50A

Výstupný prúd batérie: 2A

Predné koleso: Vonkajší priemer pneumatík: 190 mm

Zadné koleso: Vonkajší priemer pneumatík: 406 mm

Celková šírka v zloženom stave: 390 mm

INFORMÁCIE



Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť používateľa

Riešenie problémov

Elektrický invalidný vozík je vybavený systémom signalizácie poruchy. V prípade poškodenia invalidného vozíka sa na ovládacom paneli rozsvieti LED dióda a zaznie alarm. Tento systém umožňuje detekciu porúch podľa tabuľky 1.

Ak dôjde k poruche po odstránení predchádzajúcich porúch, obráťte sa na autorizovaný zákaznícky servis.

Tabuľka 1 Základné riešenie problémov

číslo alarmu	Dióda	Príčina
1	1 LED	Vybitá batéria
2	2 LED	Porucha ľavého motora
3	3 LED	Porucha ľavej brzdy
4	4 LED	Chyba pravého motora
5	5 LED	Porucha pravej brzdy
6	6 LED	Preťaženie ovládacieho panela
7	7 LED	Porucha joysticku
8	8 LED	Porucha ovládacieho panela

9	9 LED	Porucha ovládacieho panela
---	----------	----------------------------

Tabuľka 2 – Aby bol váš elektrický invalidný vozík v dobrom stave, mal by byť pred každým použitím skontrolovaný. Okrem toho by sa kontroly invalidných vozíkov mali vykonávať aj týždenne, mesačne a polročne, ako je uvedené v tabuľke 2.

	Každé použitie	Týždenne	Mesačne	Každých šesť mesiacov
Každá časť			<input type="radio"/>	
Otáčanie, jazda, nastavenie, montáž atď		<input type="radio"/>		
Brzdy	<input type="radio"/>			
Káblové pripojenia		<input type="radio"/>		
Nabíjanie batérie	<input type="radio"/>			
Ovládanie predných kolies		<input type="radio"/>		
Pneumatické zadné kolesá		<input type="radio"/>		
Opotrebenie pneumatík			<input type="radio"/>	
Poškodenie pneumatiky	<input type="radio"/>			
Opotrebenie rúkavít, operadla a sedadla	<input type="radio"/>			
Motory				<input type="radio"/>
Ovládací panel		<input type="radio"/>		
Čistota	<input type="radio"/>			

4. MONTÁŽ

1. Elektrický invalidný vozík vyberte z obalu. 2. Najskôr rozložte invalidný vozík vytiahnutím úchytov operadla smerom von, potom pomocou úchytov na zadnej strane operadla zdvihnite operadlo, kým sa nezaistí blokovací mechanizmus. Rozložte rám invalidného vozíka smerom von a zatlačte na obe strany sedadla, kým sa úplne nerozloží. Ak chcete namontovať hornú časť operadla, umiestnite dve rúrky na miesto na oboch stranách základne sedadla. (pozri obr. 1, 2).

2 Nasadte vankúše na sedadlo a operadlo (pozri obr. 3).

3. Uvoľnite skrutky umiestnené na konzole ovládacieho panela a umiestnite ho na opierku . Potom nainštalujte ovládací panel utiahnutím skrutiek (pozri obr. 4). Riadiacu jednotku je možné namontovať na pravú aj ľavú stranu.

Pripojte zástrčky káblov riadiacej jednotky príslušného popisu k batérii, káble upevnite k rámu pomocou plastových káblových pásov (pozri obr. 5 a 6). .

5. Namontujte opierky nôh na rúrky na ľavej a pravej strane rámu (pozri obr. 7). Otočte opierky nôh dopredu, aby ste ich zafixovali vo vysunutej polohe, namontujte kolieska proti prevráteniu (pozri obr. 7 a 8).

6. Upevnite popruhy pomocou nylonovej pásky (pozri obr. 9).

7. Nastavte výšku opierky nôh, odskrutkujte poistné matice na oboch stranách opierky nôh, odstráňte skrutky (pozri obr. 10), posuňte hore alebo dole komponent, na ktorom je opierka nôh upevnená, nastavte správnu výšku, potom nasadte skrutky a utiahnite matice.



1.

2.

3.

4.

5.

6.



7.

8.

9.


10.

5. Ovládací panel

Ovládací panel je kľúčovou súčasťou elektrického invalidného vozíka. Panel obsahuje všetky elektrické prvky na ovládanie invalidného vozíka (pozri obr. 11). Ovládací panel je umiestnený na jednej z lakťových opierok a je spojený s batériami spolu s motormi.

Ovládací panel sa skladá z nasledujúcich častí:

1. Joystick
2. Indikátor batérie
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
4. Indikátor rýchlosti
5. Tlačidlo zrýchlenia
6. Uvoľnite tlačidlo
7. Klaksón
8. Zásuvka nabíjačky

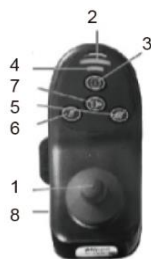

11

Joystick

Joystick slúži hlavne na ovládanie rýchlosti a smeru vozíka. Čím ďalej je joystick posunutý od stredovej polohy, tým rýchlejšie sa pohybuje invalidný vozík. Po uvoľnení sa joystick automaticky vráti do stredovej polohy a automaticky sa zabrzdí.

Tlačidlá zrýchlenia/spomalenia

Po zapnutí bude indikátor rýchlosti indikovať maximálnu rýchlosť invalidného vozíka. Maximálny rozsah otáčok udávaný počtom svetiel si môže nastaviť užívateľ. Po každom stlačení tlačidla zrýchlenia (alebo spomalenia) sa rýchlosť zvýši (alebo zníži).

██████████	0-6Km/h
██████████	0-5.5Km/h
██████████	0-5Km/h
██████████	0-4.5Km/h
██████████	0-4Km/h

12

Klaksón

Po stlačení tlačidla zaznie klaksón.

Brzda

Ak chcete elektrický invalidný vozík zabrzdíť, potiahnite brzdovú páku dozadu tak, aby bola pritlačená ku kolesám, čím sa invalidný vozík zastaví. Keď je elektrický invalidný vozík v pohybe (s pohonom alebo bez neho), zaistíte, aby páka nebola pritlačená ku kolesám zatlačením páky dopredu (pozri obrázok 13).



13

Bezpečnostný pás

Pre svoju bezpečnosť si pri každom použití invalidného vozíka zapnite bezpečnostný pás. Zatlačte pás, kým nebudete počuť kliknutie (pozri obrázok 14).



14




15

Pákové nastavenie polohy

Potiahnutím páky nastavíte uhol sklonu a vrátite sa do štandardnej polohy (pozri obrázok 15).

Opierky na nohy

Invalidný vozík je vybavený dvoma opierkami na nohy so štvorstupňovým nastavením uhla a možnosťou nastavenia vhodnej výšky (pozri obrázky 16 a 17).

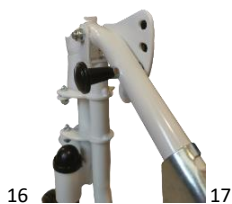

16



17

6. Bezpečnostné opatrenia

Skontrolujte, či je ovládací panel správne nainštalovaný a joystick je v strednej vertikálnej polohe.

Aby ste predišli poškodeniu zdravia, po sadnutí si zapnite bezpečnostné pásy, oprite telo o operadlo a zdvihnite hlavu.

Po zapnutí invalidného vozíka najskôr skontrolujte, či maximálna rýchlosť, ktorú indikuje indikátor rýchlosti na ovládacom paneli, je pre používateľa vhodná. Ak nie, upravte ho pomocou tlačidla zrýchlenia alebo spomalenia na ovládacom paneli. Pre istotu odporúčame použiť nižšiu rýchlosť a potom ju postupne zvyšovať.

Ak sa invalidný vozík pohybuje dobrovoľne, ihneď uvoľnite joystick, čím sa invalidný vozík zastaví, ak je joystick funkčný.

Upozornenie: Nohy držte len na opierke nôh;

Upozornenie: Počas jazdy nevyťahujte ruky za lakťové opierky.

Upozornenie: Pred použitím invalidného vozíka sa uistite, že je zablokovaný pomocou brzd.

7. Skladanie/rozkladanie a uloženie invalidného vozíka

Invalidný vozík musí byť zložený na prepravu a skladovanie nasledovne:

1. Zdvihnite opierku nôh a otočte ju smerom von o 90° (pozri obrázok 18).
2. Vyklapte časť rámu opierky nôh smerom von, otočte ju o 90° a vytiahnite (pozri obrázok 19).
3. Stlačte zámok sklopenia opierky na oboch stranách rukoväte (pozri obrázok 20).
4. Opierku chrbta a rám vozíka sklopte zdvihnutím smerom nahor za stred sedadla (pozri obrázok 21).



8. Nabíjanie batérie

Batériu je možné rýchlo a jednoducho dobiť pomocou samostatne dodávanej elektrickej nabíjačky na invalidný vozík.

POZOR! Batéria invalidného vozíka by sa mala nabíjať iba pomocou dodanej nabíjačky. Nepoužívajte iné nabíjačky batérií, ako sú nabíjačky do auta.

Nabíte batériu pomocou samostatne dodávanej nabíjačky:

- Uistite sa, že ovládací panel je vypnutý a že je stlačená brzdom páka.
- Pripojte trojpólovú zástrčku do trojpólovej zásuvky na ovládacom paneli (pozri obrázok 22).
- Zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zásuvky.
- Nabíjanie je signalizované rozsvietením LED diódy na červeno. Keď je batéria úplne nabitá, LED dióda sa rozsvieti na zeleno.
- Odporúčaná doba nabíjania je 8-12 hodín.
- Po dokončení nabíjania odpojte zástrčku nabíjačky z elektrickej zásuvky a potom ju odpojte od zástrčky na ovládacom paneli. Nabíjačku, káble a zástrčky majte pohromade vo vrecku za operadlom.



9. Ochrana proti preťaženiu

Keď sú motory preťažené, ochrana proti preťaženiu preruší prúd, aby ochránila motory a ich elektrické časti. Ochranu proti preťaženiu musia nastaviť kvalifikovaní odborníci: odskrutkujte skrutky na batériovom boxe, vymeňte záložnú poistku za poškodenú, nasadte kryt batériového boxu, dotiahnite skrutky.

10. Bezpečnostný pás

Na zaistenie bezpečnosti pri používaní elektrického invalidného vozíka musia byť zapnuté bezpečnostné pásy.

11. Čistenie a údržba po použití

- (1) Vypnite napájanie (najlepšie odpojte všetky káblové pripojenia).
- (2) Invalidný vozík uchovávajte mimo dosahu detí.
- (3) Invalidný vozík by sa mal skladovať pri normálnej teplote, aby sa zabránilo poškodeniu a predĺžila sa jeho životnosť.
- (4) Na čistenie rámu použite čistú a mäkkú handričku. Rám musí byť vysušený.

12. Obsah balenia: elektrický invalidný vozík, 3 vankúše (2 na operadlo, 1 na sedadlo), dve opierky na nohy, pás na opierky nôh, ovládač, „fúzy“ proti prevrhnutiu, návod na použitie.

SPŔOSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad s výnimkou elektrických výrobkov – vtedy postupovať spôsobom zodpovedajúcim likvidácii elektrických a elektronických zariadení. **POZNÁMKA:** obsahuje batérie.

13. ZÁRUKA

1.1 **Sériové číslo** Ak chcete poskytnúť popredajný servis a záruku, zadajte identifikačné číslo vozidla.

MODEL	AT52313
SÉRIOVÉ ČÍSLO	

1.2 Obsah záruky

1.2.1 Opravy sa vykonávajú bezplatne, ak sú problémy výrobného charakteru alebo súvisia s chybným dielom počas záručnej doby (tento typ opravy bude ďalej označovaný ako záručná oprava).

1.2.2 Záručné opravy môže vykonávať iba servis ANTAR.

1.2.3 ANTAR nezodpovedá za prepravné náklady súvisiace s opravou a výmenou.

1.2.4 Vymenené diely sú majetkom spoločnosti ANTAR.

1.3 Trvanie záruky a kryté diely

Trvanie	záruky na položku
Elektrické časti (motor, ovládač, nabíjačka)	12 mesiacov od dátumu nákupu
Rám invalidného vozíka	12 mesiacov od dátumu zakúpenia
Batéria	6 mesiacov od dátumu zakúpenia

1.4 Časti, na ktoré sa nevzťahuje záruka

Na položky uvedené nižšie sa záruka nevzťahuje:

1.4 Diely, na ktoré sa nevzťahuje záruka

Na nižšie uvedené položky sa záruka nevzťahuje:

1.4.1 Opatrebenie vyplývajúce z používania a plynutia času (napr. bežné starnutie a zhoršenie kvality laku, plastových dielov, opotrebenie pneumatík atď.);

1.4.2 Poškodenie spôsobené nedostatočnou údržbou alebo nesprávnou manipuláciou a skladovaním;

1.5 Problémy, na ktoré sa nevzťahuje záruka

Na problémy, ktoré vzniknú z nasledujúcich dôvodov, sa záruka nevzťahuje:

1.5.1 Nesprávne skladovanie;

1.5.2 Manipulácia s cieľom zmeniť alebo pridať komponenty do vozíka, ktoré nie sú schválené spoločnosťou ANTAR;

1.5.4 Poškodenie spôsobené použitím iných ako originálnych dielov ANTAR alebo iných dielov, ktoré ANTAR neodporúča;

1.5.5 Nadmerné alebo nesprávne používanie vozíka, ako je prekonávanie obrubníkov a preťaženie invalidného vozíka cestujúcimi alebo tovarom;

1.5.6 Jazda na miestach, kde by sa vozidlo normálne nemalo zapínať alebo používať;

1.5.7 Poškodenie povrchu alebo korózia spôsobená environmentálnymi faktormi, ako je pád vzduchu (chemikálie, miazga stromov atď.), kamene, krupobitie, veterné smršte, blesky, záplavy atď.;

1.5.8 Úpravy akýchkoľvek materiálov alebo komponentov, ktoré nie sú povolené spoločnosťou ANTAR (položky by sa nemali prepravovať spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť nerovnováhu invalidného vozíka);

1.5.9 Invalidný vozík nesmie byť ťahaný alebo tlačný iným vozidlom, ak je invalidný vozík obsadený alebo zadné kolesá nie sú v režime voľnobehu; a bez kontroly jeho štruktúry.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masťnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.



ANTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 19.06.2023

v1-19.06.2023