

AT52324 / AT52306

NÁVOD NA POUŽITIE INVALIDNÝ VOZÍK



VŠEOBECNÉ UPOZORNENIE

Výrobok nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte tento návod. Ak nerozumiete akýmkoľvek varovaniam, upozorneniam alebo pokynom, obráťte sa na svojho lekára alebo predajcu, aby ste predišli poškodeniu produktu.

KONTRAINDIKÁCIE

fyzické alebo psychické obmedzenia (napr. zrakové postihnutie), ktoré bránia bezpečnej manipulácii s výrobkom.

ÚČEL VÝROBKU

Invalidný vozík je určený na prepravu osôb so zdravotným postihnutím a osôb s pohybovými ťažkosťami. Výrobok je určený na používanie jednou osobou.

CIEĽOVÁ SKUPINA PACIENTOV

Osoby trpiace chorobami, dysfunkciami alebo zraneniami, na liečbu/rehabilitáciu alebo kompenzáciu ktorých je táto pomôcka určená (pozri časť o určenom použití pomôcky v tomto návode). Zariadenie si môže používateľ zakúpiť sám alebo na základe odporúčania lekára, terapeuta alebo iného odborníka. Bez ohľadu na to, či si pomôcku zakúpite sami alebo na odporúčanie lekára/terapeuta/iného odborníka, musíte vziať do úvahy dostupné veľkosti/potrebné funkcie/rozmery/varianty pomôcky, indikácie a kontraindikácie používania, ako aj informácie poskytnuté výrobcom.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE AT52324

Rám: hliník
Rozmery LWH: 101 x 63 x 88,5 cm
Rozmery v zloženom stave: 74 x 28 x 68 cm
Šírka sedadla: 46 cm
Hĺbka sedadla: 40 cm
Výška chrbtovej opierky: 42 cm
Výška lakťovej opierky: 20 cm
Výška od zeme po opierku nôh: 18,5 - 21 cm (2 úrovne nastavenia)
Výška sedadla: 47 cm
Čistá hmotnosť: 10,7 kg
Hrubá hmotnosť: 12,4 kg
Maximálne užitočné zaťaženie: 100 kg
Zadné liate kolesá: 20"
PVC predné kolesá: 6"

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE NA52306

Rám: hliník
Rozmery d.š: 106 x 62 x 92 cm
Rozmery v zloženom stave: 79,5 x 31 x 74 cm
Šírka sedadla: 46 cm
Hĺbka sedadla: 46 cm
Výška od zeme po sedadlo: 53 cm.
Výška operadla: 40 cm.
Výška lakťovej opierky: 23 cm
Výška od zeme po opierku nôh: 19 - 21,5 cm (2 stupne nastavenia)
Čistá hmotnosť: 12,4 kg
Hrubá hmotnosť: 14,3 kg
Maximálne užitočné zaťaženie: 120 kg
Zadné liate kolesá: 23"
Predné PVC kolesá: 8"
Invalidný vozík vybavený kolieskami proti prevráteniu

VLASTNOSTI VOZÍKA

- bezpečnostný pás,
- dodatočné zadné vrečko
- lýtkový stabilizačný pás
- sklopné operadlo
- rýchlospojky zadného kolesa




Tento symbol označuje maximálnu hmotnosť používateľa

UPOZORNENIA


1. Nezabudnite použiť brzdu aj pri krátkom zastavení. Dôležité je osvojiť si návyk brzdiť.
2. Vozík nie je schopný náhleho brzdenia, preto počas jazdy nadmerne nezrýchľujte.
3. Pri ostrej zákrute spomaľte, aby ste sa neprevrátili.
4. Pred pohybom invalidného vozíka sa uistite, že nohy pacienta sú na opierke nôh.
5. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky prvky správne zmontované.
6. Pri nastupovaní a vystupovaní z invalidného vozíka sa uistite, že je zatahnutá brzda.
7. Pri zostupovaní z invalidného vozíka nestojte na opierke nôh, pretože sa vozík prevráti dopredu.
8. Invalidný vozík neumiestňujte do blízkosti zdrojov ohňa.
9. Pri nesprávnom používaní výrobku môže hroziť prevrátenie. Prosím, dodržujte pokyny pre nastupovanie/vystupovanie/premiestňovanie.
10. Počas používania a manipulácie s výrobkom, ako aj pri jeho montáži a nastavovaní mechanizmov môže hroziť riziko zachytenia a/alebo stlačenia častí tela užívateľa/asistenta v otvoroch/medzerách medzi prvkami. Tieto kroky by sa mali vykonávať obzvlášť opatrne. Po nastavení stabilizujte polohu opatrným utiahnutím matíc/skrutiek
11. Je zakázané používať výrobok inak ako v súlade s jeho určením!

3. PREVÁDZKA

ROZLOŽENIE VOZÍKA SO SKLOPNÝM OPERADLOM

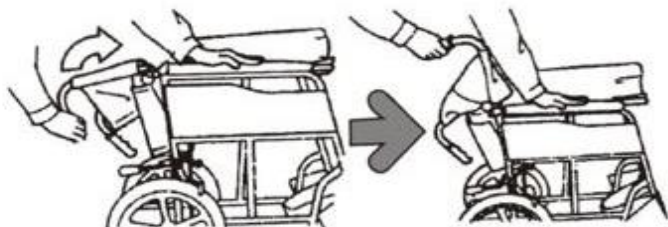


1. Uchopte rukoväť a zdvihnite ju v smere šípky, aby ste rozložili operadlo.
2. Pri zdvíhaní rukoväte zatlačte na lakťovú opierku.
3. Stlačte bočné strany sedadla, kým sa úplne neroztiahne.
4. Spustite opierky nôh nadol a nainštalujte oporný pás lýtky.

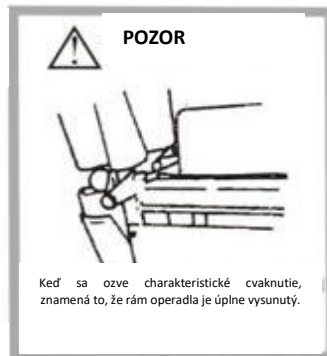


NASTAVENIE OPIERKY NOH

Opierku nôh otočte v smere šípky a nastavte jej výšku. Potom dotiahnite maticu na boku trubice opierky nôh pomocou priloženého kľúča.

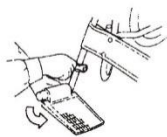

NASTAVENIE VÝŠKY OPIERKY NA NOHY

1. Pomocou kľúča mierne povoľte skrutku v mieste, kde je rúrka opierky nôh priskrutkovaná k opierke nôh, a po dokončení úprav skrutku znova utiahnite.
2. Opierku nôh otočte v smere šípky. Potom pripevnite opierku nôh.

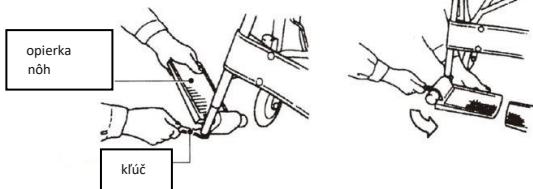

POZOR


1. Opierku nôh treba otočiť vždy, keď nastupujete alebo vystupujete z invalidného vozíka.
2. Uistite sa, že opierka nôh je aspoň 7 cm nad zemou. Ak je príliš nízka, opierka nôh narazí pri pohybe na nerovnom teréne do prekážok, čo má za následok nevyvážený invalidný vozík.

POUŽÍVANIE BRZDY

Brzda na rukoväti sa používa len na zníženie rýchlosti. Na zablokovanie invalidného vozíka použite brzdovú páku. Uistite sa, že ste použili obe bočné brzdy.


BOČNÁ BRZDA

Ak chcete vozík zablokovať, potiahnite obidve bočné brzdové páčky smerom dozadu. Ich zatlačením dopredu uvoľníte brzdu.

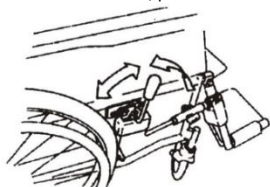

SKLADANIE VOZÍKA

1. Stlačte uvoľňovacie spony operadla, jednou rukou uchopte rukoväť a druhou potiahnite dozadu.
2. Potom uchopte stred sedadla a zložte vozík.
3. Opierky nôh by mali byť zdvihnuté.

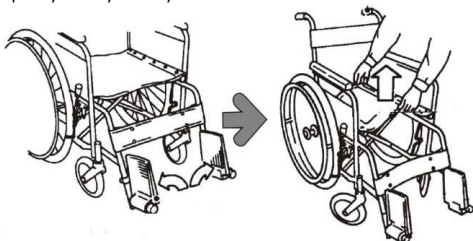

UPOZORNENIE:

V prípade, ak dôjde k „závažnej udalosti“ súvisiacej s produktom, ktorá priamo alebo nepriamo viedla, mohla alebo môže viesť k niektorej z nasledujúcich udalostí:

- a) smrť pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- b) dočasné alebo trvalé zhoršenie zdravotného stavu pacienta, užívateľa alebo inej osoby,
- c) vážne ohrozenie verejného zdravia,

je potrebné takúto udalosť nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má užívateľ alebo pacient bydlisko. V prípade Slovenska je príslušným orgánom Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu bolesti, alergických reakcií alebo iných príznakov súvisiacich s používaním výrobku, obráťte sa na svojho lekára.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- A. Utrite hlavný rám vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, korozívne prípravky a ostré/brúsne predmety.
- B. Na čistenie vankúšov sedadla a operadla použite vlažnú vodu s jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky a prípravky.
- C. Nechajte uschnúť.

SKLADOVANIE

Vozík by mal byť skladovaný na suchom a chladnom mieste. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a vlhkosti.

OBSAH BALENIA

Invalidný vozík, lytkový stabilizačný pás, návod na použitie, kľúč na nastavenie výšky opierky nôh

SPÔSOB ZNEŠKODNENIA PRODUKTU PO UKONČENÍ POUŽÍVANIA

Po ukončení používania medicínskeho výrobku, môže byť zlikvidovaný ako bežný domový odpad.

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

Sériové číslo:

Dátum predaja:

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.
- 2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného použitia tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.
- 3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné. Oprava alebo výmena poškodeného výrobku nepredlžuje záručnú dobu.
- 4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.
- 5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.
- 6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, znečistenia výrobku masnými substanciami alebo benzínom.
- 7) Produkt odoslaný do servisu v rámci reklamácie nesmie predstavovať epidemiologické ohrozenie.
- 8) TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.
- 9) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

 ANSTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Distribútor:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16



Dátum vydania návodu: 27.02.2023
v1-3 20.10.2023