

ZÁRUČNÝ LIST :

Typ:

Číslo série:

Dátum predeja:

Pečiatka predajcu

a čitateľný podpis predávajúceho:

- 1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec, dáva od dátumu predaja záruku 2 roky na chodítko.
- 2) Počas trvania záručnej doby sa firma Anmed Plus s.r.o. zaväzuje zabezpečiť nevyhnutné opravy, aby bolo chodítko funkčné, a to v období 30 dní od dátumu obdržania reklamovaného tovaru.
- 3) Ak Anmed Plus s.r.o. zistí, že náklady na opravu sú nerentabilné, môže dôjsť k výmene výrobku.
- 4) Ak zistíte, že výrobok funguje nesprávne, pošlite ho na adresu firmy Anmed Plus s.r.o. , Nádražná 329, 015 01 Rajec, alebo sa obráťte na predajcu.
- 5) **Skôr ako začnete výrobok používať, zoznámte sa s návodom na použitie. Nedodržaním pokynov výrobcu, zaniká nárok na záručnú opravu.**

NÁVOD NA POUŽITIE

CHODÍTKO – AT51088



 ANMED PLUS

POUŽITIE:

Chodítko je súčasťou rady kompenzačných pomôcok, určených pre telesne postihnuté osoby a osoby so zníženou schopnosťou mobility. Chodítko je určené pre oporu a odľahčenie dolných končatín pri chôdzi, nácviku chôdze, poúrazových a pooperačných stavoch a následné rehabilitáciu. Maximálna hmotnosť používateľa je 150 kg

POPIS:

- vyrobené z vystuženého hliníka
- doplnené súpravou dvoch kolies a nožičiek
- 3v1, môže byť použité ako chodítko na 4 nohách, pohyblivé chodítko, alebo chodítko s dvomi kolesami uľahčujúce pohyb.
- ľahké skladanie a preprava, zloženie jedným tlačidlom.
- 8 úrovní nastavenia výšky
- ergonomické rukoväte.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Výška: 75-93 cm, 8 stupňov nastavenia, každé 2 cm.

Šírka medzi rukoväťami: 46 cm

Hmotnosť s kolesami: 2,65 kg, s nohami 2,35kg

Hĺbka: 40 cm

Hrúbka v zloženom stave: 12 cm

Priemer kolies: 12,5 cm

Šírka: 46 cm (vpredú), 51 cm (vzadu)

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Pred používaním chodítka konzultujte jeho vhodnosť s ošetroujúcim lekárom. Pred používaním chodítka si

pozorne prečítajte návod na použitie a v prípade nejasností kontaktujte vášho dodávateľa.

- Nepoužívajte chodítko na nerovnom povrchu.
- Užívateľ sa nesmie nedmerne nakláňať, hlavne dozadu, inak môže dôjsť k prevráteniu
- Nepoužívajte ak hmotnosť používateľa presahuje 150 kg.
- Zabráňte kontaktu s otvoreným ohňom. Výrobok sa môže vznietiť.
- Uistite sa, že oceľový kolík pätky alebo upevňovacej spony kolesa po inštalácii prechádza otvorom po oboch stranách steny. V opačnom prípade výrobok nemusí byť stabilný a otvor sa môže zdeformovať. Čap, ktorý mení chodítko z chodiaceho na pevné by mal prechádzať otvorom na oboch stranách steny.
- Chodítko sa rozloží tak, že ho chytíte za bočné strany a otvoríte ich. Po rozložení chodítka by malo západkové tlačidlo v hornej strednej časti chodítka vojsť do otvoru a chodítko zaistiť v rozloženej polohe.
- Pre zloženie chodítka stlačte bezpečnostnú poistku a potiahnite bočné strany chodítka dovnútra a potom chodítko zložte.

Chodítko je možné použiť ako pevnú variantu alebo chodiacu variantu. Možnosť rolovania znamená, že bočné stany chodítka sa navzájom posúvajú čo umožňuje posunúť chodiaci rám dopredu zdvihnutím iba jednej strany. V pevnej variante sa chodítko stáva pevným. Dá sa s ním pohnúť zdvihnutím celého chodiaceho rámu a jeho posunutím vpred.

Aby sa chodítko mohlo prepnúť z možnosti chodiacej varianty na pevnú variantu, odstráňte spony zo strán chodítka nainštalujte ich do príslušných otvorov v prednej časti.

Ak chcete chodítko prepnúť na chodítko na dvoch kolesách, odtráňte spony zaisťujúce nohy, potom ich vytiahnite a kolesá vložte na svoje miesto.

Pred prvým použitím produktu upravte jeho výšku. Odstráňte sponu, nastavte výšku – rovnakú pre všetky 4 nohy a potom zasuňte sponu do príslušného otvoru. UISTITE SA, ŽE OCEĽOVÝ KOLÍK PRECHÁDZA OTVOROM NA OBOCH STRANÁCH STENY. V opačnom prípade nemusí byť výrobok stabilný a otvor sa môže zdeformovať.

PRESÚVANIE SA S CHODÍTKOM:

Verzia s kolesami: pohybuje sa vpred zdvihnutím ho, zatlačím a položením zadnej časti na zem.

Verzia s nožičkami: posúva sa tak, že sa nadvihne a položí mierne pred seba, pri chôdzi sa zdvihne jedna strana chodítka a zatlačí sa dopredu.

ÚDRŽBA:

Chodítko je možné čistiť a udržiavať bežnými čistiacimi, dezinfekčnými a konzervačnými prostriedkami, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá. Pre zachovanie maximálnej funkčnosti a stability odporúčame pravidelne kontrolovať polohu všetkých istiacich prvkov, stav gumových nástavcov a polohu aretačných poistiek, ev.odstraňovať mechanické nečistoty všetkých častí. V prípade nutnosti vymeňte opotrebované gumové nástavce.

SERVIS A OPRAVA:

V prípade potreby odstránenia závady alebo vykonania servisu, kontaktujte predajcu, ktorý vám poskytne všetky informácie.

ZÁRUKA:

Záruka sa poskytuje na dobu 24 mesiacov od dátumu prevzatia pomôcky a nevzťahuje sa na poškodenie vplyvom nesprávneho použitia a opotrebenia, spôsobené obvyklým užívaním. Záruka zaniká tiež pri akejkoľvek úprave, oprave, nastavovaní alebo výmene akejkoľvek časti iným subjektom ako výrobcom alebo dovozcom (pozri nižšie) alebo predávajúcim.

Výrobca:

ANTAR Sp. J.

ul. Zawiślańska 43

03-068 Warszawa, Poľsko



Dovozca:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,

E-mail:anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk

Tel./fax: 041/542 49 16

IČO: 44741448 DIČ: SK 2022802716

V.SK-1.1-3.10.2019