

NÁVOD NA POUŽITIE A MONTÁŽ
Sedačka sprchová sklopná SPU – 370

Sprchová sedačka pomáha ľuďom s obmedzenou schopnosťou pohybu pri udržiavaní každodennej osobnej starostlivosti a prispieva k výraznému zvýšeniu bezpečnosti pri pohybe v sprche alebo vo vani.

Postup inštalácie:

1. Odporúča sa sedačku montovať vo vodorovnej polohe.
2. Vyvrtajte otvory do steny pre hmoždinky podľa otvorov na sedačke vo výške od zeme, ktorú budete potrebovať. Hĺbka otvoru v stene (v podklade) musí byť rovná hĺbke zasunutia skrutky +10 mm navyše.
3. Vyčistite otvory v stene od prachu.
4. Vložte hmoždinky do vyvrtaných otvorov.
5. Priložte otvory na sedačke presne k otvorom v stene.
6. Medzi skrutku a telo sedačky vložte plastový krúžok a priskrutkujte (skrutky musia byť zaskrutkované - dotiahnuté celé). Vhodná pre montáž na stenu z tehál plných keramických či kremičitanových alebo bežného betónu. Nie je vhodná pre montáž do sadrokartónu. Skontrolujte, či je sedačka pevne priskrutkovaná.
7. Nasaďte krytky na skrutky.
8. Po vyradení z prevádzky môžete zaobchádzať ako s bežným odpadom.

ÚDRŽBA

Pri použití sedačky sa odporúča pravidelne kontrolovať, či upevňovacie skrutky nie sú voľné. V prípade akejkoľvek vôle, skontrolujte príčinu a utiahnite skrutky alebo vymeňte za nové spolu s hmoždinkami.

DEZINFEKCIA

Sedačka je opakovane použiteľný produkt. V záujme zachovania správnej hygieny po každom použití postriekajte sedačku aerosólovým prípravkom, prostriedok vyrábaný na báze chlórnanu sodného a nechajte pôsobiť 15 minút. Potom dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.

UPOZORNENIE

1. Po inštalácii sprchovej sedačky, sa ubezpečte, že je pevne pripevnená k podkladu, aby nespadla. Pri nedostatočnom upevnení sedačky hrozí pád a zranenie.
2. Nikdy neinštalujte sprchovaciu sedačku do slabej steny, napr. sadrokartónu, pretože môže dôjsť počas používania k narušeniu steny – zrúteniu a v dôsledku toho môže dôjsť k ťažkému zraneniu.

Nosnosť sedačky je 100 KG

Výrobca:

ANTAR Sp. J., ul. , Zawiańska 43, 03-068 Warsaw, tel 22 518 36 00, fax: 22 518 36 30

VÝHRADNÝ DOVOZCA:

ANMED PLUS, s.r.o.

Nádražná 329, 015 01 Rajec

E-mail: anmedplus@anmedplus.sk

www.anmedplus.sk

