

ZÁRUČNÝ LIST

Model:

.....

Sériové číslo:

.....

Dátum predaja:

.....

Pečiatka predajcu a čitateľný podpis predávajúceho:

.....

1) Firma Anmed Plus, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec dáva týmto záruku na výrobok 2 roky odo dňa vydania tovaru kupujúcemu.

2) V záručnej dobe sa Anmed Plus zaväzuje vykonať nevyhnutné opravy za účelom možnosti opätovného používania tovaru v termíne do 30 dní od dňa obdržania reklamácie.

3) Anmed Plus si vyhradzuje právo výmeny tovaru v prípade, že náklady na jeho opravu uzná za nerentabilné.

4) V prípade zistenia nesprávneho fungovania tovaru je ho potrebné bezodkladne odoslať na adresu firmy Anmed Plus (uvedenej v bode 1) alebo kontaktovať predajcu.

5) Pred použitím tovaru je potrebné oboznámiť sa s návodom na použitie a riadiť sa inštrukciami v ňom uvedenými. Používanie tovaru v rozpore s jeho určením má za následok stratu záruky.

6) Záruka nepokrýva poškodenia vzniknuté následkom prepichnutia alebo prerezania výrobku ostrým predmetom, poškodenia vzniknuté v dôsledku pôsobenia vnútorných mechanických síl, tlaku váhy prekračujúcej maximálnu váhu užívateľa popísanej v návode na použitie, znečistenia výrobku mastnými substanciami alebo benzínom.

7. TENTO ZÁRUČNÝ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNE SPOLU S DOKLADOM O KÚPE (ÚČTOVNÝM DOKLADOM, BLOČKOM ALEBO FAKTÚROU). V PRÍPADE REKLAMÁCIE PROSÍME O PRILOŽENIE DOKLADU O KÚPE.

8) Reklamácie predložené bez dokladu o kúpe nebudú akceptované.

Toaletné kreslo -návod na použitie

Modely: AT01001, AT01002, AT01003



 ANMED PLUS

Toaletné kreslá- modely AT01001, AT01002, AT01003

sú modernými výrobkami určenými pre osoby s obmedzenými možnosťami pohybu. Umožňujú vykonávanie fyziologických potrieb bez nutnosti presunu osoby na WC. Môžu sa používať v bezprostrednej blízkosti postele alebo miesta, kde sa nachádza osoba s obmedzenými možnosťami pohybu. Vďaka použitiu ľahkých materiálov je ich možné ľahko presúvať. Model AT01003 je vybavený kolieskami umožňujúcimi prechod s kreslom medzi danými miestami (avšak bez osoby sediacej na kresle).

Model AT01002 má možnosť regulovania šírky sedadla a rozloženia kresla, čo uľahčuje jeho prepravu.

UPOZORNENIA A VÝSTRAHY

- Nepoužívať v prípade, že váha užívateľa prekračuje 150 kg.
- Nehojsť sa v kresle – hrozí pád a úraz.
- Pred použitím sa uistite, že vedro je na mieste a poklop je odsunutý.
- Po použití je potrebné vyprázdniť vedro a umyť ho. V opačnom prípade hrozí kontakt s výlučkami a riziko infekcie.
- Chráňte pred priamym ohňom. Môže dôjsť k zapáleniu výrobku.

POUŽÍVANIE:



Pred prvým použitím výrobku je potrebné nastaviť jeho výšku. Za týmto účelom je potrebné odopnúť sponu, nastaviť výšku – rovnako pre všetky štyri nohy a následne zasunúť sponu do príslušného otvoru. JE POTREBNÉ UISTIŤ SA, ŽE OCEĽOVÝ HROT PRECHÁDZA CEZ OBE STRANY NOHY. V opačnom prípade môže byť výrobok nestabilný a otvor sa môže zdeformovať.



Vedro je po odsunutí krytu potrebné zasunúť do koľajníc. V prípade, že sú koľajnice odmontované, je ich potrebné zmontovať vsunutím koncoviek do otvorov v hornej časti rúrok, na ktorých je namontovaná toaletná doska. Po vykonaní fyziologických potrieb užívateľom sa odporúča vybratie vedra, prikrytie poklopom, vyprázdnenie a umytie.

OŠETRENIE VÝROBKU

Výrobok je potrebné pravidelne čistiť vodou a čistiacimi prostriedkami. Výrobok môže byť vystavený vplyvu dezinfekčných prostriedkov.

Nepoužívaný výrobok musí byť skladovaný v suchom prostredí. Vyhýbajte sa jeho dlhodobému vystavovaniu priamemu slnečnému žiareniu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO DOBE POUŽITEĽNOSTI

Po stiahnutí výrobku z užívania môže byť považovaný za komunálny odpad. Odporúča sa separovať časti výrobku po jeho stiahnutí z používania.

ZLOŽENIE VERZIE S REGULOVANOU ŠÍRKOU



V prípade modelu AT01002 je možné rozloženie výrobku a reguláciu jeho šírky. Za tým účelom je potrebné odmontovať upínacie spony, nastaviť požadovanú šírku a opätovne namontovať spony (pozri náčrt). JE POTREBNÉ UISTIŤ SA, ŽE OCEĽOVÝ HROT PRECHÁDZA CEZ OBE STRANY NOHY. V opačnom prípade môže byť výrobok nestabilný a otvor sa môže zdeformovať.

VERZIA S KOLIESKAMI

Za účelom presunu verzie kresla s kolieskami je potrebné odblokovať brzdy, presunúť kreslo na želané miesto a opätovne zablokovať brzdy.

PROSÍME UISTITE SA, ŽE BRZDY SÚ ZABLOKOVANÉ, KEĎ SI NA KRESLO SADÁ UŽÍVATEĽ.

KRESLO NIE JE URČENÉ NA PRESUN SO SEDIACIM UŽÍVATEĽOM NA ŇOM.

Výrobca:

ANTAR Sp. J.
ul. Zawiślańska 43
03-068 Warszawa, Poľsko

Dovozca:

ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec,
E-mail: anmedplus@anmedplus.sk; www.anmedplus.sk
Tel./fax: 041/542 49 16

